

## 4TALK4

De 4Talk4 is een robuust en eenvoudig communicatiehulpmiddel met opgenomen spraak en vier duidelijke en eenvoudig te bedienen toetsen. Elke toets kan vier verschillende boodschappen bevatten, waardoor tot 16 berichten opgenomen en bewaard kunnen worden (in totaal 4 minuten opgenomen spraak). Gelijktijdig met het uitspreken van de boodschap is het mogelijk via een externe aansluiting bijvoorbeeld batterijgestuurd speelgoed te laten werken. Zo kan door het aanraken van een toets met een afbeelding van een poes erop het woord 'poes' uitgesproken worden en een speelgoedpoes miauwen.

4Talk4 is ontwikkeld om personen zonder verbale communicatie via het bedienen van schakelaars invloed op zijn directe omgeving uit te laten oefenen. Bovendien stimuleert het schakelaargebruik door de actiereactie koppeling.



De 4Talk4 wordt op een tafel geplaatst, met daarop aangesloten eventuele bedienschakelaars en batterijgestuurd speelgoed. De grote bedienknoppen zijn met het afdekrooster gemakkelijk te bedienen. Als de gebruiker de knoppen niet kan bedienen, is het mogelijk externe bedienschakelaars aan te sluiten.

De knoppen op de 4Talk4 zijn naar wens in te vullen door in de 4 plastic mapjes afbeeldingen te doen, waarmee de bijbehorende boodschap herkenbaar wordt.

Het volume is regelbaar van fluisterzacht tot klassikaal niveau. Boodschappen opnemen, wissen en wisselen van niveau is eenvoudig.

### Scan4

Scan4 is een scannende versie van de 4Talk4 en is ontworpen als een introductie op scannen. De Scan4 heeft heldere scanlampjes, optionele auditieve prompts en kan in verschillende modes worden gebruikt. Net als de 4Talk4 heeft het aansluitingen voor batterij gevoede speeltjes.

- De modus voor scannen met een enkele schakelaar start op een realistische langzame snelheid.
- Een modus voor scannen met twee schakelaars voor de gebruiker die twee schakelaars kan hanteren en beter kan bedienen.
- Enkele schakelaar functie, waarbij het indrukken van de schakelaar het scannen bedient en het ingedrukt houden ervan de functie activeert.
- Kan voor directe selectie worden gebruikt, zoals de 4Talk4. Druk op de vlakken om de boodschappen te horen. Het lichtje boven het vlak zal oplichten om aan te geven welke is ingedrukt.

### Technische gegevens:

Geheugencap.: max. 4 minuten opgenomen spraak

Gewicht : 1.340 g

Afmetingen : 13 x 32,5 x 9,5 cm

Afm. toets : 6,5 cm (zeshoekig)

Voeding: 4 x 1,5V batterijen

### Artikelnummer:

**PG-4TALK4** 4Talk4 communicatiehulpmiddel

