

DV-2000 DEURALARM

DV-2000 is ontworpen om mensen te helpen die niet weten waar zij 's nachts heen gaan. In een situatie waarin iemand naar het toilet moet, kan hij/zij eindigen in de kamer van de buurman. Hiervandaan wordt de weg niet terug gevonden, tot ieders ongemak. Dit kleine apparaatje kan de verwarde persoon helpen, voordat er problemen worden veroorzaakt.

De DV-2000 is een klein verplaatsbaar apparaat die op de deur gemonteerd kan worden met het bijgeleverde klittenband. Wanneer de deur beweegt, zendt het apparaat een alarm naar de micropager 433-10, een andere pager of een belsysteem. De DV-2000 kan ook aangesloten worden op een drukmat die naast het bed wordt gelegd, zodat er gealarmeerd wordt, zodra de patiënt uit bed stapt.

De DV-2000 kan ingesteld worden met twee drukknoppen aan de voorkant.

De DV-2000 kan aan en uit gezet worden door te drukken op de AAN / UIT knop.

Met de MODUS knop wordt het interval (1-20 sec) tussen activering van de DV-2000 en alarmering ingesteld. Op deze wijze wordt ook het interval tussen het openen van de deur en alarmering ingesteld.

De DV-2000 heeft een ingebouwde klok waarmee vooraf ingesteld kan worden wanneer de detector actief moet zijn, bijvoorbeeld van 23.00 uur tot 07.00 uur.

De DV-2000 heeft een ingebouwd batterijalarm dat aangeeft wanneer de batterij vervangen moet worden. De batterij indicator knippert wanneer het voltage te laag wordt en geeft elke minuut een piep. Het is ook mogelijk een laag batterijvoltage alarm te sturen via een afzonderlijk kanaal.

Bestaande belsystemen, de belsystemen van KNOP ELEKTRONIK'S, een pager, micropager 433-10 en/of RX-200 kunnen de alarmoproepen vanaf de DV-2000 registreren.

De DV-2000 heeft ook een ingebouwde draadloze zender die met KNOP ontvangers kan werken. Bovendien heeft het relais uitgangen voor koppeling aan andere apparatuur.

Artikelnummer:

KNO-DV2000 Deuralarm



