

QUOVADIS NEDERLAND - EPILEPSIE ALARMERING

Het hebben van epilepsie hoeft absoluut geen reden te zijn om continue iemand in de nabijheid te moeten hebben.

Wel is er altijd dreiging dat er een epilepsie aanval komt opzetten op het moment dat niemand aanwezig is om assistentie te verlenen.

EpiCare 3000 en Emfit Epilepsie Monitor


Voor detectie van tonisch clonische aanvallen in bed bieden wij twee systemen: EpiCare 3000 en Emfit Epilepsie Monitor.

Wanneer de gebruiker een tonisch clonische aanval heeft, detecteren deze systemen de trillingen. EpiCare 3000 is zeer geschikt voor jonge kinderen. Bij gebruik van kinderen adviseren wij altijd een extra sensor te gebruiken.

Beide systemen zijn alleen geschikt voor tonisch clonische aanvallen.

Verschillen

EpiCare 3000 bevat een bewegingssensor die aan de zijkant van het matras bevestigd wordt. Het apparaat is gemakkelijk in te stellen door bediening van slechts 2 knoppen, een display zorgt ervoor dat u precies weet wat u doet. Daarbij registreert het alle tonisch clonische aanvallen. Ook de aanvallen die, door korte duur of lage intensiteit, niet tot een alarm geleid hebben, worden geregistreerd.

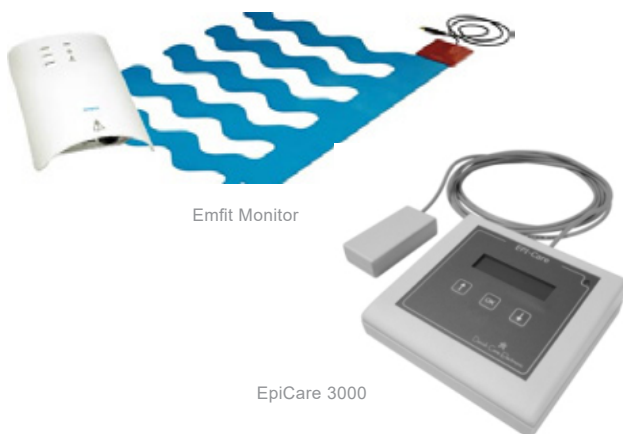

Het Emfit Epilepsie Monitor systeem bevat een bedsensor. Deze wordt onder het matras geplaatst. Alleen aanvallen die een alarm geven worden geregistreerd in de Emfit Epilepsie Monitor. Het instellen van de Emfit Epilepsie Monitor is lastiger in te stellen dan de EpiCare.

De juiste instellingen

Iedere gebruiker is verschillend, alle aanvallen zijn verschillend, zowel qua duur als qua intensiteit van de bewegingen. Het is daarom erg belangrijk dat u de tijd neemt om het systeem in te stellen en de instellingen van het systeem te wijzigen totdat u de ideale instellingen voor de gebruiker heeft gevonden.

Epi-Care Free

Dit epilepsiealarm voor tonisch clonische aanvallen wordt om de pols gedragen. Het meet voortdurend de bewegingen en vergelijkt deze met normale waarden op een centrale unit. Het bereik van de sensor is 20 meter, zodat veel bewegingsvrijheid mogelijk is.



Epi-Care Free Mobile

Deze variant is voor gebruik buitenshuis. De sensor heeft een tweeweg draadloze verbinding tussen zichzelf en de Android smartphone. Als een aanval met motorische activiteit plaatsvindt, stuurt de sensor een signaal naar de telefoon. De telefoon stuurt een tekstboodschap uit met de locatiedetails van de drager, en maakt een spraakoproep naar de ingestelde contacten.



Aansluitmogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om ouders of verzorgers op de hoogte te stellen van een alarm: via een zorgsysteem in een instelling, via een pieper of via een zorgtelefoon.

Na een modificatie kan het alarmsysteem direct worden aangesloten op het zorgsysteem van de instelling waar de persoon verblijft.

Een andere mogelijkheid is om het systeem aan te sluiten op een piepersysteem. De pieper dient echter wel in de buurt van het alarmsysteem te zijn, dat wil zeggen, in dezelfde woning.

Tot slot is het mogelijk het alarmsysteem aan te sluiten op een alarmtelefoon. Deze telefoon belt naar een vooraf ingesteld telefoonnummer. Wanneer het eerste nummer niet wordt beantwoord, wordt automatisch het volgende nummer gebeld. Er kunnen maximaal 9 telefoonnummers ingesteld worden.



Vergoeding

Epilepsiealarmering wordt over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wij raden echter altijd aan hierover contact op te nemen met uw verzekeraar.

Sinds begin 2010 biedt het Nederlands Epilepsie Fonds de mogelijkheid gedurende drie maanden epilepsiealarmering te huren. Op dit moment is nog niet duidelijk hoelang deze actie wordt voortgezet.

Positionering / plaatsbepaling

Om snel te kunnen bepalen waar iemand zich bevindt, is het mogelijk een valalarm met positiebepaling te gebruiken.

Bij gebruik van een zorgtelefoon kan de epilepsie-signalering aangesloten worden op domotica-toepassingen. Als bijvoorbeeld 's nachts een toeval optreedt, kan automatisch de deur ontgrendeld en verlichting aan gedaan worden. De hulpverlener hoeft nu niet in het donker de woning binnen te gaan.

De gebruiker zelf bepaalt wat wordt ingesteld voor welke situatie en op welk moment.

Meer informatie

Voor meer informatie over de epilepsie producten verwijzen wij u naar onze website: www.qvn.nl.

Hier kunt u uitgebreide informatie vinden, ook over onze andere productcategorieën:

- Omgevingsbediening
- Communicatiehulpmiddelen
- Rolstoelintegratie
- Zorgcommunicatie
- Zorgalarmering
- Domotica
- Zorgdomotica
- Personeelsalarm
- Persoonlijk alarm
- Bedienaanpassingen
- ...

Uiteraard kunt u ook contact opnemen per telefoon, 035 - 548 87 01 of email info@qvn.nl.