

## ELINE SPREEKT

spraakcomputer, ontwikkeld vanuit de gebruiker

**‘Wat wil je op je boterham?’ ‘Pindakaas.’ Een alledaagse conversatie, maar lastig te voeren als je niet of moeilijk kunt praten. Met de iPad app ‘Eline spreekt’ wordt communiceren in zo’n situatie een stuk eenvoudiger.**



Het begon met Tim.

Tim is verstandelijk beperkt en kan niet praten. Hij is aangewezen op een dure spraakcomputer om met zijn omgeving te kunnen communiceren. Toen Tim een nieuwe begeleidster kreeg duurde het vier weken voordat haar naam in de spraakcomputer was ingevoerd.

### Alternatief

Met Tim in het achterhoofd is een gebruiksvriendelijk alternatief ontwikkeld: een app voor de iPad. De iPad biedt al veel mogelijkheden op het gebied van communicatie, zoals het maken van foto's en filmpjes, zoeken op internet en een spraakfunctie. Bij de ontwikkeling van de app is hier gebruik van gemaakt. De flexibiliteit is het grootste verschil met bestaande spraakcomputers. Met deze app kun je oneindig veel mogelijkheden toevoegen.

Toen Tim belangstelling kreeg voor André Hazes, kon zijn moeder er meteen een tegel bij plaatsen. Of zijn laatste verjaardagsfeest: foto's met namen van alle gasten, zodat hij het feest nog een keer kan herbeleven.

### Rust

Met 'Eline spreekt', genoemd naar de begeleidster van Tim, willen we een bijdrage leveren aan het levensgeluk van mensen met een beperking. De app kun je gratis proberen en als het bevalt kun je een abonnement afsluiten. Wat je ervoor terugkrijgt is rust, het scheelt veel frustratie als je omgeving je gewoon begrijpt.

### Simpel & Intuïtief

'Eline spreekt' is net als de iPad in alle opzichten simpel en intuïtief in gebruik. Voor installatie en updates heb je geen PC of Mac nodig.



### Grid & tegels

In een handomdraai pas je 'Eline spreekt' aan. Gebruik Sclera iconen, beelden van internet of foto's die je met de iPad maakt.



### Gebruik van audio


Audio toevoegen is makkelijk te doen. Je kunt tekst eenvoudig zelf inspreken of door de iPad automatisch laten uitspreken.



### Mobiel gebruik

'Eline spreekt' is overal te gebruiken. Thuis, in de auto en op vakantie. En met de case zelfs geschikt voor onder de douche en in bad.



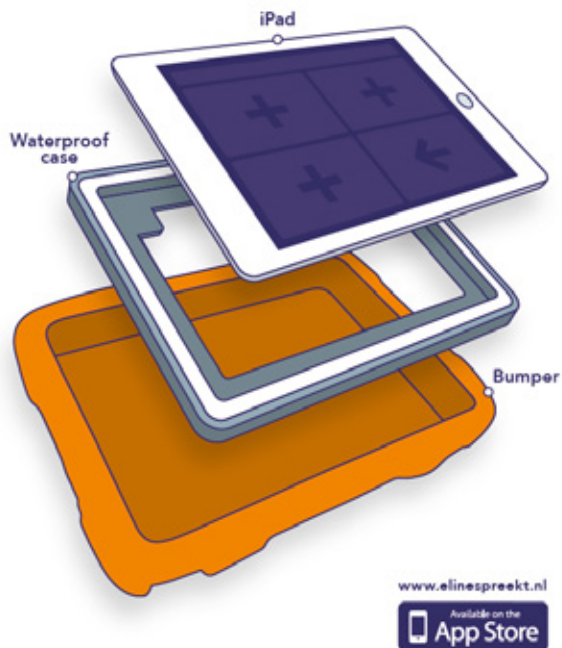


### Beheermodus

Om in de beheermodus te komen, houd je je vinger ca 5 sec op het scherm en laat je het los, het inlogscherm verschijnt. Teken daarna met de klok mee een gesloten cirkel in het venster. Hiermee wordt de beheermodus geactiveerd.




### Begeleide toegang

Als je de functionaliteit van de iPad wilt beperken tot één app, gebruik dan begeleide toegang. Om deze in te schakelen ga je naar de instellingen van de iPad. Hier kies je algemeen uit de linkerkolom en vervolgens toegankelijkheid. Daarna scroll je door naar begeleide toegang. Stel hier een viercijferige toegangscode in en vink begeleide toegang aan. Dan open je de app en druk drie keer op de homeknop naast/onder het scherm.

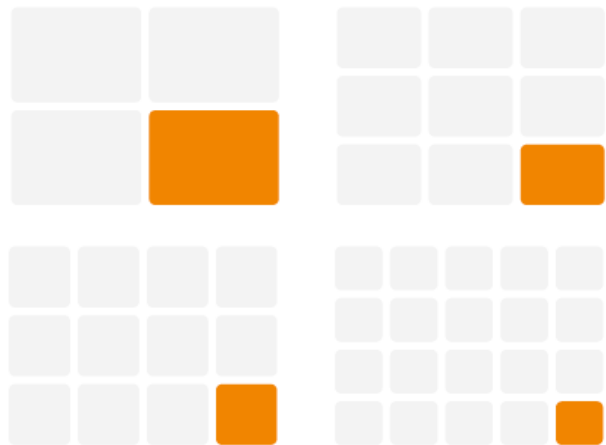

### Tegel toevoegen of bewerken

Voeg een nieuwe grid- of audiotegel toe door op een lege tegel te drukken. Deze herken je aan het + teken. Bewerk je tegel met een geschreven of gesproken woord, een foto of afbeelding uit de bibliotheek of een icoon.

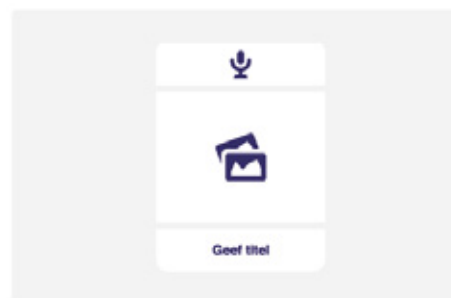

### Spreeksnelheid

Om de snelheid van spreken voor de app in te stellen ga je naar de instellingen van de iPad. Hier kies je de app Eline Spreekt uit de linkerkolom. Bij spreeksnelheid kun je met behulp van de slider de snelheid instellen.

Voor meer informatie over de app en alle abonnementsvormen kijk je op [www.elinespreekt.nl/faq](http://www.elinespreekt.nl/faq)

### Artikelnummer

- ELI-IOS-01-3** 3 maanden abonnement
- ELI-IOS-01-12** 12 maanden abonnement
- ELI-IOS-01-60** 60 maanden abonnement
- ELI-IOS-02-60** 60 maanden ab, oneindig gebruik