

## ASSISTENTIE OPROEP BIJ BEADEMING

### doorgifte van beademingsalarm

**Een geluid klinkt. Een melding van de beademing! De canule is los of de cliënt moet uitgezogen worden. Maar hoe weet de assistent of mantelzorger dit als hij niet in de buurt is en het alarm niet kan horen?**

Een effectieve oplossing wordt gecreëerd met de All in One. All in One is een universele oplossing voor het doorsturen van assistentie oproepen. De oplossing bestaat uit twee hoofdeenheden; een centrale unit en een ontvanger, vaak pager of pieper genoemd.

### Draadloos en draadgebonden, passief en actief

Er zijn verschillende mogelijkheden om het signaal van de beademingsmachine door te geven:

- Op het beademingscontact van de beademingsmachine wordt een draadloze zender geplaatst die het signaal van het alarm doorgeeft aan de All in One.
- De beademingsmachine wordt direct bekabeld op de All in One aangesloten.

Naast de passieve alarmering kan een actieve assistentie oproep worden gemaakt met verschillende soorten schakelaars of omgevingsbediening.

De All in One stuurt het alarmsignaal lokaal naar de ontvanger. Op de ontvanger ziet u direct welke

assistentie oproep geactiveerd is. De assistent of zorgverlener is direct op de hoogte van de situatie en kan de juiste actie ondernemen.

Indien gewenst wordt de melding tevens via het gsm netwerk als sms bericht naar een mobiele telefoon verzonden.

Deze oplossing kan ook op een rolstoel en in de slaapkamer worden toegepast.

De All in One is voorzien van een netvoeding voor permanente stroomvoorziening op 230V en heeft ingebouwde noodstroom accu's.

Voor een schematische weergave van de mogelijkheden, zie ommezijde. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.

### Artikelnummer

<b>3307-01</b>	All in One gsm: centrale unit + pager
<b>3307-08</b>	All in One universele zender
<b>3307-09</b>	All in One polszender
<b>AIN-2708</b>	Signaleringsonderbreker

Let op! De apparatuur is geen medisch hulpmiddel of vervanging voor menselijk toezicht. Persoonlijk toezicht blijft noodzakelijk.



All in One centrale unit



All in One pager



## SCHEMATISCHE WEERGAVE ASSISTENTIE OPROEP BEADEMING

Uitvoer:

- ontvanger
- gsm / sms bericht




### Passieve invoer:

- Beademingsoproep via RJ
- Extra aansluiting via RJ

### Actieve invoer:

- Schakelaar via 3,5 mm
- Draadloze oproep knop
- Draadloos via T-Box

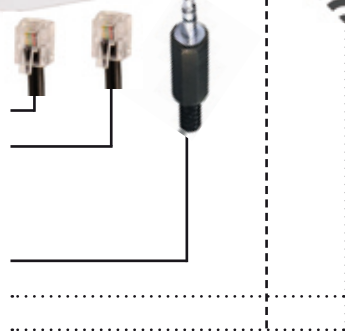

voeding via rolstoelaccu

+/-



ingebouwde draadloze zender

beademingsalarm koppeling