

## PROGRAMMEERBARE INFRA ROOD ZENDER

GewaLink programmeerbare Infra Rood zenders kunnen worden gebruikt door vele mensen met een lichamelijke beperking. Ouderen en mensen met leerproblemen kunnen de Infra Rood zender tevens gebruiken met grotere bedienknoppen die makkelijk ingedrukt kunnen worden.


Het GewaLink systeem werkt met Infra Rood licht en de afstand is daarom beperkt tot 10-30 meter of de kamer waarin u zich bevindt.

Dankzij deze kwaliteiten kan de zender op vele plaatsen en voor diverse functies worden gebruikt. Buitenshuis kan de zender worden gebruikt om bijvoorbeeld toegangs- of garagedeuren te openen. Binnenshuis kan de zender worden gebruikt om liften, appartementdeuren, lampen, televisie, geluidsapparatuur, intercom, sloten, telefoons, alarmering/signalering etcetera te bedienen.



Bepaalde GewaLink zenders zijn voorzien van een speciaal IR-kanaal dat onafhankelijk geprogrammeerd kan worden. Deze codesleutel wordt vooral gebruikt voor het bedienen van sloten en deuropeners waar veel veiligheid nodig is. De programmeerbare zenders, Control Prog, GEWA Connect, GEWA Maxi en GEWA One worden in aparte folders beschreven.

Deze Infra Rood zenders kunnen kanalen "leren" van andere afstandsbedieningen, maar zijn ook te gebruiken voor bijvoorbeeld deuropeners, intercom, verlichting, telefoon, lift en gordijnen.

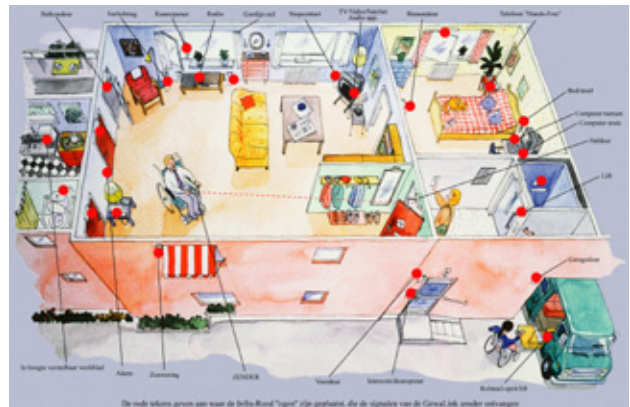

De zenders zijn onderdeel van het GEWA "SmartHouse" concept en kunnen samen met al deze producten gebruikt worden.

Voor veel verschillende functies is slechts één zender nodig. Ook is het mogelijk om met een zender met maar één knop op een veilige manier in uw huis te kunnen.



De zenders zijn verkrijgbaar in meerdere modellen en hebben verschillende standaard eigenschappen.

- GEWA Code kanaal voor hoge veiligheid bij het bedienen van bijvoorbeeld de deur van een appartement.
- Macrotoetsen gebruiken, waarbij één toets meerdere commando's kan uitvoeren.
- Drukvertraging in de bedientoetsen.
- Via een computer kanalen en codes bewaren en de GewaLink zenders naar individuele wens instellen.
- Grote zendsterkte: de zender hoeft niet recht naar de ontvanger gericht te worden.

De GewaLink zenders zijn geavanceerd en betrouwbaar. Elke GewaLink programmeerbare zender kan communiceren met een computer voor het instellen en het maken van veiligheidskopieën van de instellingen.



|                               | Medi Multi  | Medi Standard   | Medi Easy   | Control Prog   | Big Jack  | GEWA One  | GEWA Connect  | GEWA Maxi   |
|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|
| <b>IR leren</b>               | ja  | ja  | ja  | ja   | ja  | ja  | ja  | ja  |
| <b>RF</b>                     | ja  | nee   | nee   | nee  | nee   | ja  | ja  | ja  |
| <b>Knoppen</b>                | 8   | 8   | 4/2   | 18   | 0   | nee   | nee   | 16  |
| <b>Niveau</b>                 | 4   | 4   | 1   | 5  | 1   | veel  | veel  | 1   |
| <b>Funcities</b>              | 28  | 28  | 4   | 241  | 6   | veel  | veel  | 16  |
| <b>Macro</b>                  | ja  | ja  | nee   | ja   | ja  | ja  | ja  | ja  |
| <b>Triller</b>                | ja  | ja  | ja  | nee  | nee   | ja  | nee   | nee   |
| <b>Scannen</b>                | ja  | nee   | nee   | ja   | nee   | ja  | ja  | nee   |
| <b>Scherm</b>                 | nee   | nee   | nee   | nee  | nee   | ja  | ja  | nee   |
| <b>Piep volume instelbaar</b> | ja  | ja  | ja  | ja   | ja  | ja  | nee   | ja  |
| <b>Acceptatie vertraging</b>  | ja  | ja  | ja  | ja   | ja  | ja  | ja  | ja  |
| <b>Oplaadbaar</b>             | nee   | nee   | nee   | nee  | nee   | ja  | ja  | ja  |
| <b>Afmeting mm</b>            | 100 x 55 x 22   | 100 x 55 x 22   | 100 x 55 x 22   | 134 x 70 x 25  | 140 x 100 x 38  | 166 x 83 x 13,3   | 108 x 67 x 22   | 242 x 160 x 42  |
| <b>Gewicht g</b>              | 105   | 105   | 105   | 189  | 280   | 267   | 153   | 700   |
|                               | <b>4292-00</b>  | <b>4292-20</b>  | <b>4292-40</b>  | <b>4257-00</b>   | <b>4025-00</b>  | <b>4616-05</b>  | <b>4611-80</b>  | <b>4611-30</b>  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |