



Communicatie & geletterdheid

Een verzameling van toepasbare oplossingen m.b.t. taal, communicatie en leren

Februari 2020

Introductie bij de informatieset

Communicatie & Geletterdheid

Voor u ligt een set met informatie. QuoVadis heeft enkele informatiesets ontwikkeld, en houdt deze up-to-date om belanghebbenden te informeren over specifieke onderwerpen. Met deze set richten wij ons onder meer op:

Ouders / begeleiders / verzorgers / onderwijzers van kinderen:

communicatieproblemen
aanleren actie reactie
aangepast leren lezen

Wilt u meer weten of heeft u opmerkingen?
Kijk op **www.qvn.nl** of neem contact met ons op via **info@qvn.nl** of bel **035-5488701**






Inhoudsopgave

	pagina
• Introductie	2
• Communicatiehulpmiddelen	5
• Look to Learn – oogbesturing oefenen	7
• Look to Read – leren lezen met ondersteunde communicatie	9
• Grid 3 – communicatiesoftware	11
• Grid Pads – communicatiesets	19
• Grid for iPad – communiceren met tablet	23
• Speech Case – behuizing voor iPad	25
• Indi 7 en I-110 – communicatiesets	27
• I-13 en I-16 - communicatiesets	29
• Boardmaker – materialen maken met symbolen	31
• Het ABCDE van QuoVadis	35

Wat vind jij de mooiste kleuren?

Enkele karakters uit Look to Learn en Look to Read

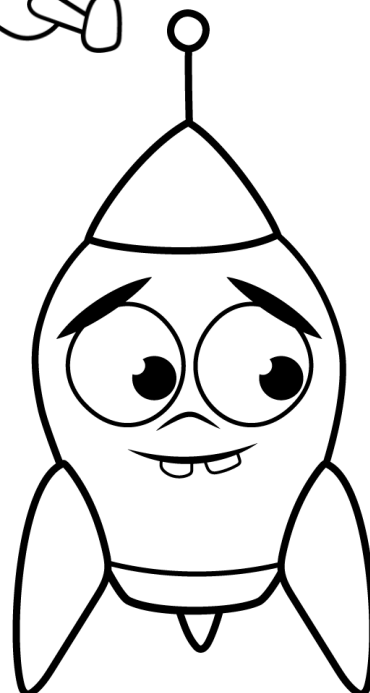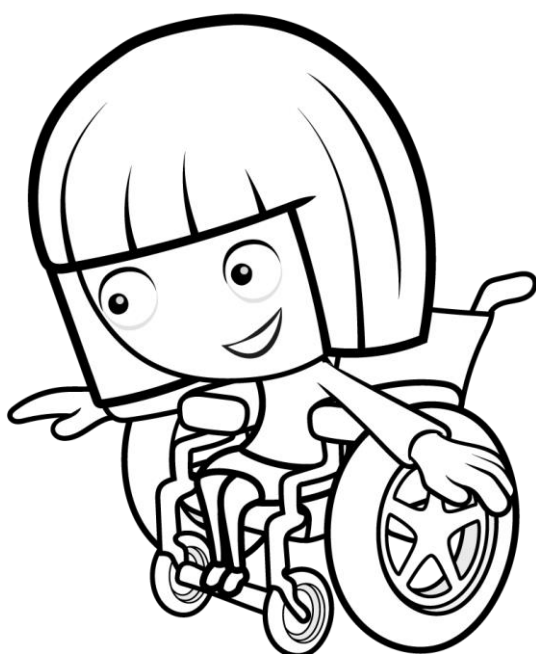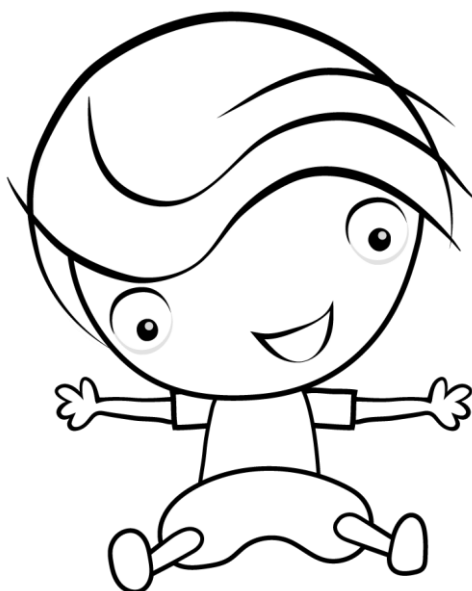

QUOVADIS NEDERLAND - COMMUNICATIEHULPMIDDELEN

Niet voor iedereen is praten een vanzelfsprekendheid. Communiceren willen we allemaal! Mentale of fysieke beperkingen die aangeboren of verworven zijn, kunnen een belemmering vormen voor het hebben van contact met anderen. Een ondersteunend communicatiehulpmiddel kan een oplossing zijn.

Om aan de diverse wensen en behoeften van onze cliënten tegemoet te kunnen komen, hebben wij een groot aanbod communicatiehulpmiddelen en -software. QuoVadis heeft sinds 1993 ervaring met communicatiehulpmiddelen op basis van tekst, symbolen en combinaties daarvan. Daarbij zijn we altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen.


Symbolen

Voor cliënten die onvoldoende of niet gealfabetiseerd zijn, bieden wij diverse communicatiehulpmiddelen op basis van symbolen. De mogelijkheden zijn zeer verschillend. Onze medewerkers adviseren u graag over het meest geschikte communicatiehulpmiddel.



Tekst

Communicatiehulpmiddelen op basis van tekst worden vooral gebruikt door personen die op latere leeftijd door een aandoening of ziekte problemen krijgen met spreken. Er zijn diverse systemen beschikbaar. Wij hebben zeer goede ervaringen met o.a. Grid for iPad, Allora, Lightwriter, et cetera.

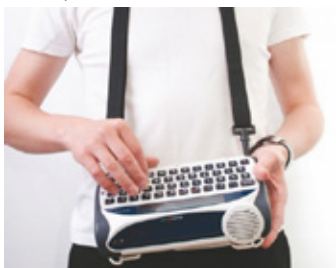

Symbolen en tekst

Andere hulpmiddelen combineren symbolen en tekst. Dit biedt de mogelijkheid van beide soorten gebruik te maken of te kiezen voor een van twee.



Eenvoudige hulpmiddelen

Personen die een laag cognitief vermogen hebben, kunnen door middel van eenvoudige communicatiehulpmiddelen toch, in beperkte mate, interacteren met hun omgeving.



Bedienaanpassingen

Afhankelijk van de mogelijkheden en de wensen van de gebruiker wordt gekozen voor communicatiehulpmiddelen met meerdere functies per knop, statisch of dynamisch of 1 functie per knop.

Tevens wordt gekozen voor een beperkte of uitgebreide bediening, met of zonder bedienaanpassingen.


Aangepaste bedieningsvormen zijn: beeldscherm-toetsenbord, laser, spraakbediening, oogbolbesturing, bedienschakelaars.



Software

Communicatie software wordt op maat geprogrammeerd op een voor communicatie geschikte tablet pc.

Met Grid3 krijgt de gebruiker toegang tot een beeldschermtoetsenbord. Communiceren met Grid 3 kan op basis van tekst of symbolen, met of zonder spraakuitvoer, digitaal of synthetisch. Met de juiste soft- en hardware aanpassingen is ook omgevingsbediening mogelijk. Zo kan de gebruiker zelf audiovisuele apparatuur bedienen, gordijnen en deuren openen, verlichting bedienen, et cetera.

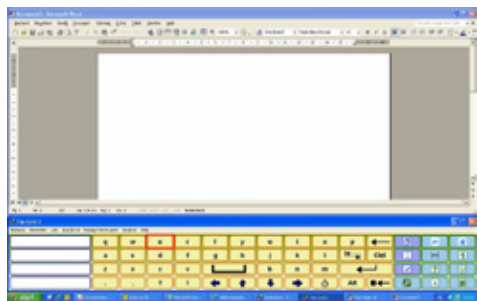

Bevestiging

Uiteraard hebben we diverse bevestigingsmaterialen om de communicatievoorziening op een tafel, bij het bed of op een rolstoel te bevestigen. Niet alleen thuis, maar ook in het ziekenhuis (IC, neurologie, verpleegafdeling).

Spraakversterking

Niet alleen ter vervanging van spraak maar ook ter versterking van nog aanwezige spraak zijn hulpmiddelen mogelijk in de vorm van spraakversterkers, bijvoorbeeld de spraakversterker.



Vergoeding

We hebben goede ervaringen met betrekking tot het vergoeden van voorzieningen door zorgverzekeraars. Ook zijn er mogelijkheden voor bovenbudgettaire verstrekking via AWBZ/WLZ via het zorgkantoor. Bij het uitbrengen van een offerte voor een voorziening houden wij uiteraard rekening met het eventuele verloop van een aandoening en de mogelijkheden en wensen van de gebruiker.

QuoVadis Nederland BV heeft niet alleen veel ervaring met communicatiehulpmiddelen. Ook met omgevingsbediening hebben we jarenlange ervaring. Omgevingsbediening maakt het mogelijk functies in de woon- of leefomgeving met behulp van een (Infra Rood) zender te bedienen. Afhankelijk van een eventueel verloop van een aandoening, de mogelijkheden en de wensen van de gebruiker bieden wij een adequate voorziening.

Voor meer informatie over onze communicatiehulpmiddelen verwijzen wij u naar onze website: www.qvn.nl.

Hier kunt u uitgebreide informatie vinden, ook over onze andere productcategorieën:

- Omgevingsbediening
- Rolstoelintegratie
- Zorgcommunicatie
- Zorgalarmering
- Domotica
- Zorgdomotica
- Personeelsalarm
- Persoonlijk alarm
- Epilepsiesignalering
- Bedienaanpassingen
- ...

Uiteraard kunt u ook contact opnemen per telefoon, 035 - 548 87 01 of email info@qvn.nl.

LOOK TO LEARN

oogbesturing oefenen

Look to Learn is een software pakket met 40 activiteiten voor mensen die voor het eerst met oogbesturing aan de gang gaan. De activiteiten zijn speciaal ontwikkeld om op een leuke manier te oefenen daarmee de vaardigheden van toegankelijkheid en het maken van keuzes met oogbesturing te verbeteren.

Elke activiteit ontwikkelt een andere vaardigheid, variërend van beginnende oorzaakgevolg training tot accurate oogbediening. De software is in samenspraak met onderwijzers en therapeuten tot stand gekomen en biedt tevens ondersteuning bij het trainen.

Voorop staat: Look to Learn is ontwikkeld om vooral motiverend en leuk te zijn!

Look to Learn is ontwikkeld door Sensory Software. Dit Britse bedrijf heeft zich bewezen op het gebied van ondersteunende communicatie, onder meer met het softwarepakket Grid 3.

De Look to Learn software kan gedownload worden op de website van Sensory en biedt toegang tot drie van de spellen. Na aanschaf van de software en activering met de licentiecode heeft u toegang tot alle 40 spellen. De software is in meerdere talen verkrijgbaar, waaronder het Nederlands.



Vijf leergebieden

De 40 Look to Learn activiteiten zijn op basis van leren en ontwikkelen onderverdeeld in vijf kerngebieden:

- **Zintuigen** Ontwikkeld voor oorzaak-gevolg training
- **Ontdekken** Stimuleert de gebruiker het hele scherm te gebruiken
- **Doelen** Helpt de accuratesse van de oogbesturing te verbeteren
- **Keuze** Ontwikkelt de vaardigheid van het maken van keuzes
- **Controle** Verfijnt besturing met de ogen

Progressie

Look to Learn stimuleert, van de eerste oorzaak-gevolg activiteiten tot het maken van keuzes en spelen van spelletjes. We adviseren om in aanvulling op Look to Learn communicatiesoftware zoals Grid 3 en software voor het ontwikkelen van geletterdheid te gebruiken.





Aangepast voor jou!

Veel van de activiteiten kunnen worden aangepast, zodat favoriete afbeeldingen of video's kunnen worden gebruikt. Wees creatief en maak er wat leuks van!



Training

Look to Learn is ontwikkeld in samenwerking met onderwijzers en therapeuten. Hierdoor is onder meer een hulpmiddel ontwikkeld dat tijdens de trainingen kan worden gebruikt:

- **Blik volgen** Waar op het scherm kijkt de gebruiker naar? Is de cliënt bezig met de juiste inhoud.
- **Doel bepalen** Leer doelen te vinden en je blik erop te fixeren.
- **Keuzes maken** Introduceer het maken van keuzes in voorbereiding op het gebruik van aangepaste communicatiehulpmiddelen

Analyse

Het ingebouwde analyse hulpmiddel toont waarnaar iemand op het scherm heeft gekeken tijdens de activiteiten, in de vorm van een zogenoemde hittekaart. Hittekaarten kunnen worden opgeslagen, geprint en gebruikt om voortgang te meten en successen vast te leggen.



SCENES AND SOUNDS


Look to Learn kan worden uitgebreid met het pakket Scenes and Sounds.

Er zijn 26 activiteiten beschikbaar die zich richten op interactieve visuele omgevingen, muziek en geluiden.

Interactieve visuele omgevingen: De interactieve visuele omgevingen leren om het hele scherm te bekijken en te focussen op specifieke objecten.



Geluiden: Leuke activiteiten op basis van muziek en geluid, Muziek en geluid stimuleren altijd enorm. Deze activiteiten zorgen ervoor dat je zowel kunt optreden als luisteren.

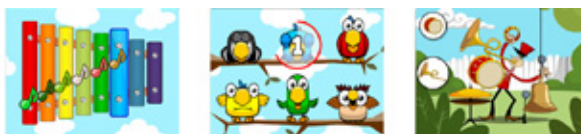

Vaardigheden: Dit is ontwikkeld om de oogbesturingsvaardigheden verder te ontwikkelen. In de activiteiten binnen de categorie Vaardigheden zitten enkele bekende karakters en een aantal grappige verrassingen....



Let op: Om Scenes and Sounds te kunnen gebruiken, is een licentie van Look to Learn nodig.

Artikelnummer:

- 0501-00** Look to Learn software
- 0501-01** Look to Learn Scenes and Sounds

LOOK TO READ

leren lezen met ondersteunde communicatie

Met Look to Read kunnen kinderen met een beperking onafhankelijk aan de slag met boeken en er plezier aan beleven. Geschikt voor oogbesturing, schakelaar en directe selectie.

Iedereen kan plezier hebben met Look to Read als deel van de reis naar geletterdheid – of je nu net begint of al wat leesvaardigheden hebt. Ieder boek is volledig toegankelijk met de leuke inhoud en leeractiviteiten om je bij iedere fase te helpen.

Voor wie is Look to Read?

Look to Read is geschikt voor wie leert met hulpmiddelen voor ondersteunde communicatie, in iedere fase van de reis naar geletterdheid, inclusief degene die:

- Oorzaak en gevolg begrijpen en toegangsvaardigheden ontwikkelen
- Voor de eerste keer onafhankelijk boeken ontdekken

Belangrijkste eigenschappen

- 16 originele geanimeerde verhalen
- 4 stadia van vooruitgang
- Gesymboliseerde spraakgrids voor ieder verhaal
- Werkboek voor volgen en vastleggen van voortgang
- Hoog contrast modus voor gebruikers met visuele beperkingen
- Verhaal navertellen met 'Wat gebeurde er'-activiteit

Hoe het werkt

1. Kies een van de 16 verhalen over de magische avonturen van een jongen, hij heet Pip, en zijn familie.
2. Zie de woorden van het verhaal in het scherm staan. Kijk, klik, raak het aan, druk op je schakelaar of beweeg je muis over de woorden om ze hardop voor te laten lezen.
3. Als je de hele zin hebt gehoord, brengen leuke animaties het verhaal tot leven.

16 geanimeerde verhalen

De verhalen in Look to Read zijn opgedeeld in vier verschillende leesfasen – iedere fase introduceert nieuwe geluiden en woorden om verder te bouwen op wat je al eerder hebt geleerd. Als je verder door de fasen komt, worden complexer geluiden geïntroduceerd en volgen er langere verhalen met meer woorden per bladzijde.

Fase 1

Dik Dier
Pip Hopt
Tien Kippen
Kit Likt



Fase 2

Welke Eend
Koning Konijn
Wens van Friet
Zoem Vlieg



Fase 3

Tik Tak Klok
Ik Ben Een Vis
Vijver Picknick
Mams Boodschappen



Fase 4

Sneeuw
Nachtspinnen
Regenachtige Dag
Vlekje Draak





Liefde voor lezen aanmoedigen

Vroege geletterdheid begint met het ontdekken van boeken. Kijken naar de voorkant, leren dat tekst van links naar rechts vloeit, en van pagina naar pagina bewegen terwijl je verder komt in het verhaal – het zijn allemaal belangrijke onderdelen voor wie begint met lezen.

Vroege communicatie ondersteunen

Gesymboliseerde spraakgrids zijn beschikbaar bij ieder verhaal in Look to Read. Iedere grid combineert veelgebruikte kernwoorden (zoals meer, stop, leuk) met sleutelwoorden uit het verhaal. Ze zijn altijd beschikbaar, dus je kunt over de verhalen praten terwijl je ze leest.

Lezen met hoog contrast

Voor lezers met visuele beperkingen is een hoog contrast modus ontwikkeld. Deze instelling kan eenvoudig worden aangezet binnen de software. Achtergronden zullen naar blauw veranderen met gele tekst, om een sterker contrast te geven.

Probeer het eerste verhaal gratis

Je ontmoet Pip en een erg hongerig dier dat graag jam eet.



Specificaties

Look to Read is ontwikkeld om te werken op communicatiehulpmiddelen en tablets die groot en klein zijn.

Minimum specificatie

Windows 10
Intel Atom 1.44GHz
4GB RAM
2 GB Beschikbare harde schijf ruimte

Artikelnummer

0501-03 Look to Read

SOFTWARE VOOR INTERACTIEF LEREN

Look to Read is onderdeel van de software reeks Interactief Leren. Deze producten zijn ontwikkeld om leerlingen die starten met het ontwikkelen van taal en toegangsvaardigheden te helpen motiveren.



N.B. Look to Read is gebaseerd op Engelstalige educatieve software.

In verband met verschillen in klank- en woordvorming, is in het Nederlands, naast het lezen, alleen de activiteit 'Wat gebeurde er' beschikbaar.

Wij hebben ons uiterste best gedaan passende Nederlandstalige vocabulaire in te passen.

Wij staan open voor suggesties om Look to Read verder in het Nederlands te optimaliseren.

THE GRID 3

er is zoveel mogelijk met Grid 3

U kunt zo veel meer doen met Grid 3, de nieuwe communicatiesoftware van Smartbox. Met de nieuwe opties en toepassingen kunt u zeggen wat u wilt, heeft u toegang tot uw computer en bestuurt u uw omgeving eenvoudiger dan ooit tevoren.



Eerste in zijn soort

Na jaren van onderzoek en ontwikkeling legt Grid 3 de lat voor ondersteunende technologie een stukje hoger.

Eenvoudig bewerken

Het maken en personaliseren van de bronnen in Grid 3 is eenvoudig en intuïtief. Alles is binnen enkele muisklikken bereikbaar en het maken van aanpassingen tijdens het gebruik gaat sneller dan ooit, dankzij de aanraakvriendelijke interface.

Prachtige eenvoudig

De gebruikersinterface van Grid 3 is intuïtief en ziet er goed uit. Het ontwerp en de opmaak zorgen ervoor dat uw grid sets er mooi uitzien en eenvoudiger te gebruiken zijn.

Eindeloze mogelijkheden

Of u nu net start met ondersteunende technologie of een technologische allesweter bent, Grid 3 ondersteunt u in uw dagelijkse leven.

ontwikkeld door:

Smartbox

SYMBOLENCOMMUNICATIE

Dankzij Symbolencommunicatie in Grid 3 kunt u symbolen gebruiken die de weergave zijn van de woorden en zinnen die u wilt zeggen. Zodra u uw hulpmiddel of Windows PC heeft aangezet heeft u een breed scala aan kant-en-klare grid sets beschikbaar. U kunt meteen aan de slag!



Ontworpen voor iedereen

De grid sets in Grid 3 zijn ontwikkeld voor mensen met verschillende niveaus van geletterdheid en toegankelijkheidsvaardigheden, zodat u voor elk individu de juiste middelen kunt kiezen. De populaire Symbol Talker grid sets bieden een vier-stappen traject, zodat u kunt leren van vroege communicatie door tot geletterdheid.



Kernwoordenschat

De meer geavanceerde grid sets maken gebruik van de kernwoordenschat, de woorden die we het meest gebruiken in dagelijkse gesprekken. Deze geavanceerdere grids hebben meer cellen in elke grid, zodat een grotere woordenschat en meer keuzes worden geboden.

Slimme grammatica

Slimme gereedschappen in de symbolen grid sets zorgen ervoor dat u snel en nauwkeurig kunt zeggen wat u wilt. De slimme grammatacfunctie verandert werkwoordcellen in uw grid op intelligente wijze, terwijl u schrijft.



Snel bewerken

Ook het bewerken van grid sets gaat snel en eenvoudig. Met behulp van de intuïtieve bewerking interface kunt u in een paar muisklikken nieuwe woorden toevoegen, symbolen veranderen of nieuwe grids maken.

Alle symbolencommunicatie grid sets zijn gebaseerd op 15 jaar ervaring in het werken met logopedisten, specialisten op het gebied van ondersteunde communicatie en door samen te werken met erkende experts op het gebied van alternatieve communicatie. Grid 3 maakt gebruik van de volledige symbolenbibliotheken van Widgit, SymbolStix en de SmartBox Snaps fotobibliotheek. U kunt ook gebruik maken van PCS en Bliss symbolen.


TEKSTCOMMUNICATIE

Tekstcommunicatie in Grid 3 zorgt ervoor dat geletterde gebruikers sneller en nauwkeuriger communiceren dan ooit.



Tekstcommunicatie vereenvoudigd

Er zijn verschillende toetsenbord ontwerpen waaruit een keus kan worden gemaakt en diverse functies die innovatieve nieuwe technologie gebruiken om een meer natuurlijke gebruikerservaring te creëren.

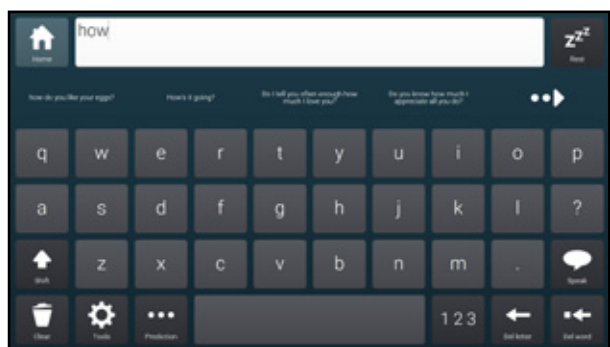

Snelle communicatie


Met behulp van Grid 3 kunt u sneller dan ooit uw bericht overbrengen. Het prachtig ontworpen assortiment van toetsenborden is eenvoudig te gebruiken met elk soort alternatieve toegang, zoals schakelaars of oogbesturing.

Chatgeschiedenis

Een van de meest opwindende nieuwe functies is Chat Geschiedenis. Grid 3 onthoudt alles wat u ooit gezegd heeft, zodat u het in een handomdraai nog eens kunt zeggen. Vele berichten zijn voorgeprogrammeerd en klaar om hardop uit te spreken. Deze berichten worden voorgesteld op basis van hoe vaak u iets zegt en waar u bent, doordat we nu voor het eerst ook locatiediensten gebruiken.

Zinsuggesties op basis van gps locatie

Wat u zegt is afhankelijk van degene met wie u praat en waar u bent. Grid 3 maakt gebruik van uw locatie om zinnen voor te stellen, zodat u snel kunt vragen om een kopje koffie zodra u een restaurant binnenkomt.

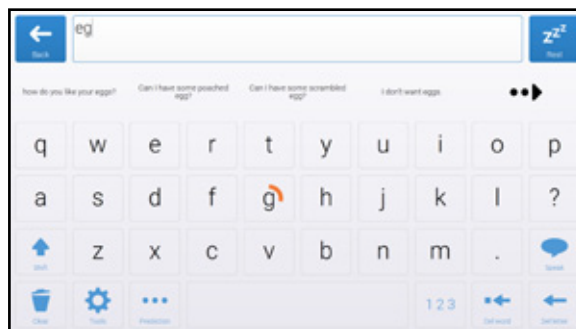

SwiftKey technologie

Grid 3 gebruikt SwiftKey woord- en zinsvoorspelling om de snelheid en nauwkeurigheid te vergroten. U hoeft zich geen zorgen te maken als u verkeerd spelt of een woord verkeerd typt. Blijf gewoon schrijven en Grid 3 kan nog steeds voorspellen wat u wilt zeggen.

Toetsenbord ontwerpen voor iedereen

Geen enkele oplossing is voor iedereen geschikt, dus heeft Smartbox een reeks toetsenborden gemaakt die werken met verschillende bedienopties en verschillende niveaus van geletterdheid.

Fast Talker 3

De Fast Talker 3 grid set wordt met Grid 3 meegeleverd en biedt de meest krachtige toepassingen voor tekstgebaseerde communicatie naast toegankelijke apps voor Facebook, Twitter, SMS en nog veel meer.



INTERACTIEF LEREN

Interactief leren in Grid 3 is een compleet nieuwe manier om te leren en te ontdekken door middel van animaties.



25 geanimeerde activiteiten

U kunt kiezen uit 25 spannende activiteiten: van het oppassen op uw beeldschermhond Dilbert tot het ontwerpen van uw eigen auto, of ermee racen op een circuit!

4 belangrijkste leergebieden

Alle activiteiten vallen onder een van de vier belangrijke leergebieden binnen Interactief leren. Zo kunt u beginnen met het leren van oorzaak en gevolg, voordat u doorgaat naar keuzes maken en vervolgens kunt u uitdagingen aangaan. Interactieve visuele scènes kan op elk moment worden geïntroduceerd en kan een vertrouwd uitgangspunt zijn als u al gebruik maakt van de populaire Look to Learn softwaretitels.



1. Oorzaak en gevolg

De eerste activiteitencollectie is bedoeld voor het leren van oorzaak en gevolg. Deze bevat een magisch penseel dat geanimeerde afbeeldingen schildert en u uw eigen vuurwerkscherm laat maken!

2. Keuzes

In de tweede set met activiteiten kunt u creatief zijn met een selectie van activiteiten waarin u keuzes maakt. U kunt een mode-ontwerper zijn en uw spullen op de catwalk tonen, een gekke cake bakken of zelf een nieuwe sportwagen bouwen.

3. Uitdagingen

De derde reeks met activiteiten zorgt voor een spannende reeks uitdagingen en spelletjes. Met behulp van de geleerde vaardigheden in de andere activiteiten kunt u een auto racen op een racecircuit, vier-op-een-rij spelen en op een avontuur vol actie gaan met Robo slak!



4. Interactieve visuele scènes

De laatste set activiteiten in Grid 3 is opgebouwd rond interactieve visuele scènes. Elke scène biedt motiverende en dynamische content die taal en geletterdheid helpt leren. Deze middelen vormen de volgende stap voor mensen die gebruik maken van Look to Learn software en klaar zijn voor de volgende stap naar functionele communicatie.

Praat erover

De Interactief Leren activiteiten in Grid 3 zijn gemaakt om u te helpen zich te ontwikkelen richting alternatieve communicatie. Elke motiverende activiteit wordt begeleid door grids waarmee u kunt praten over wat u heeft bereikt.

Progressie naar ondersteunde communicatie

Als u vooruit komt binnen de Interactief Leren activiteiten ontwikkelen de praat grid sets zich met u mee. De grids zijn zo ontworpen dat ze vergelijkbaar zijn met de Symbol Talker grid sets, waardoor de overstap naar ondersteunde communicatie een natuurlijker voortgang is dan ooit tevoren.



Leren op maat

U kunt de Interactief Leren grids in uw eigen tempo gebruiken. Praat als u er klaar voor bent, voeg woordenschat toe als u het nodig heeft met snel bewerken en ontdek de interactieve visuele scènes; wanneer u eraan toe bent.

TOEGANKELIJKHEIDS APPS

Grid 3 biedt toegankelijkheids apps die gebruikers helpen meer te doen. Voor alles zijn er grid sets, van iemand snel even bellen, een sms sturen of een foto e-mailen. Het is makkelijker dan ooit om met familie en vrienden in contact te blijven.



Sms en telefoon


Het voeren van telefoongesprekken en het versturen van sms-berichten vanuit Grid 3 is eenvoudig. Alles wat u nodig heeft, is een Android-telefoon met Bluetooth. Als u een symbolen gebruiker bent, kunt u nu ook voor het eerst sms met gesymboliseerde tekstberichten gebruiken.

Beelden vastleggen en delen

Bedien de camera's aan de voor- en achterkant op uw apparaat eenvoudig met behulp van de camera grid set. Deel uw foto's vervolgens snel via e-mail of start een diavoorstelling.

Muziek en video

Surfen binnen uw mediabibliotheek is een compleet nieuwe ervaring in Grid 3, met automatisch gegenereerde album covers en video miniatures.

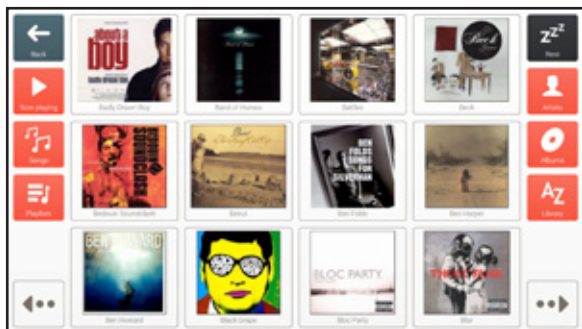

E-mail met bijlagen

Foto's bijvoegen, bijlezen van gesprekken en e-mail groepen met slechts een paar selecties: het bijhouden van uw inbox is stress-vrij, dankzij het moderne ontwerp en de nieuwe functies.

Surfen op internet


Bezoek uw favoriete websites en navigeer ze met gemak, met de compleet nieuwe webbrowser met URL voorspelling, verbeterde navigatie en favorieten tool.

Notities maken en opslaan

Met de handige notities app kunt u binnen enkele seconden notities maken, lezen en versturen. Met behulp van SwiftKey voorspelling kunt efficiënter dan ooit werken en studeren. Van boodschappen- en takenlijsten tot losse aantekeningen, de grid set dateert en ordent uw notities voor u.

Gesymboliseerde berichten

Als u met behulp van symbolen communiceert, kunt u er nu voor het eerst voor kiezen berichten gesymboliseerd te verzenden en te ontvangen via e-mail en sms-apps. Dit opent een wereld van communicatie die eerder niet toegankelijk was.

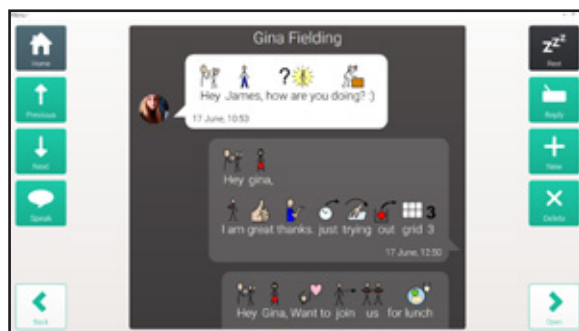

Al uw contacten, allemaal op één plek

U kunt uw contacten op één plaats beheren en contact houden met al uw e-mail, sms en telefoon grid sets.

Toegankelijke apps voor iedereen

Alles in Grid 3 is zo ontworpen dat het kan worden benaderd met oogbesturing, aanraking, schakelaar of andere muisaanwijzers. Iedereen kan contact houden.



Een groeiende bibliotheek van apps

De bibliotheek van toegankelijkheids apps zal blijven groeien. Er worden namelijk steeds nieuwe manieren ontwikkeld om toegang te krijgen tot de bestaande sociale media platformen en voor handige toepassingen voor het werk en thuis.

Apps voor (bijna) alles

Met Grid 3 kun je kiezen uit diverse toegankelijke apps die je helpen om alles te doen: van het nemen van een snelle foto met de camera, het bellen van een vriend met behulp van een Android-telefoon of het controleren van uw Facebook pagina.



Toegankelijke social media

Social media is toegankelijker dan ooit tevoren met de geheel nieuwe reeks grid sets voor Facebook, Twitter en YouTube. De toegankelijke apps zijn ontworpen voor gebruik met alle vormen van alternatieve toegang.

Facebook

Onze geheel nieuwe Facebook-integratie geeft u de volledige controle over 's werelds meest populaire sociale netwerk. Moeiteloos omhoog en omlaag schuiven in uw nieuwsberichten, berichten op uw tijdlijn plaatsen of praten met uw vrienden met Facebook Messenger, het kan allemaal vanuit de speciale app.



Twitter

De Twitter app biedt een eenvoudige interface om met de hele wereld te spreken in slechts 140 karakters. Plaats, favoriet, retweet en beantwoord tweets met slechts een paar selecties.



YouTube

Krijg direct toegang tot miljoenen video's met de nieuwe YouTube app. Het is zeer eenvoudig om te een video te zoeken en te bekijken.



Snelle navigatie

U kunt in- en uitzoomen in elke sociale media app en met gemak links markeren of selecteren, dus alle functies zijn binnen uw bereik.


OMGEVINGSBEDIENING

Grid 3 omgevingsbediening stelt u in staat om van alles te bedienen: van lampen tot uw voordeur, uw TV tot uw geluidsapparatuur, alles simpelweg door het selecteren van cellen op een grid.



Eenvoudige navigatie

Het heldere en eenvoudige ontwerp van elke omgevingsbediening grid zorgt ervoor dat u eenvoudig en intuïtief kunt navigeren en selecties kunt maken.

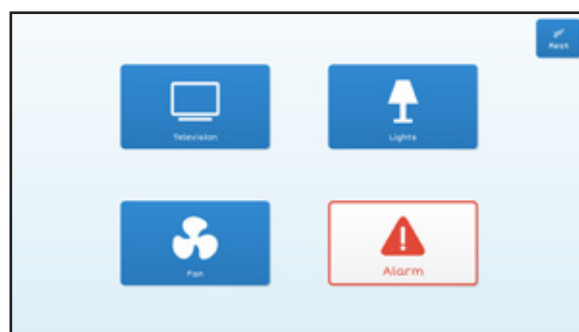

Televisie, muziek en film

Van kanaal wisselen, het volume aanpassen en tv-gidsen bekijken gaat snel en kan vlot worden ingesteld dankzij de functie voor afstandsbedieningen voor het leren van eigenschappen binnen een enkele selectie.




Uw afstandsbediening programmeren

De enkele selectie leerfunctie is zo ontwikkeld dat het niet meer nodig is om voor iedere grid opnieuw in te leren. Een ingeleerde functie werkt op alle grids, inclusief uw grid met favoriete televisiezenders.

Functies afstandsbediening

In Grid 3 kunt u kiezen voor (1) eenmaal indrukken, voor als u de TV aan / uit wilt zetten of een menu wilt oproepen, (2) acties vasthouden, wat handig is als u een kanaalnummer wilt bouwen, (3) ingedrukt houden, wanneer u het volume of de helderheid aan wilt passen en (4) een actie herhalen - handig bij het zappen.

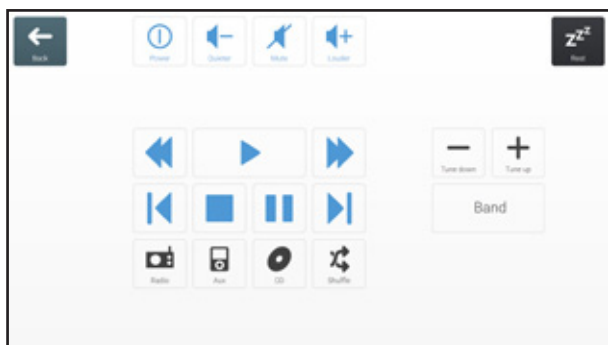

Uw deur en intercom bedienen

Als u een op afstand bedienbare telefoon of deurintercom heeft, kunt u in slechts een paar selecties vanuit Grid 3 gesprekken beantwoorden en de deur openen.

Uw huis bedienen

Grid 3 kan vele andere aangepaste woonaccessoires bedienen, waaronder lampen, verwarming, stoelen, bedden, intercom, ramen en gordijnen.

Extra afstandsbediening

Als u een Grid Pad Pro of Grid Pad Eye heeft, zult u in staat zijn om radio-ontvangers in uw woning te bedienen. Hierdoor is het mogelijk om nog meer producten, zoals verwarming en lampen aan te sturen.

Eenvoudige omgevingsbediening

Er is ook een grid set ontworpen voor mensen die beginnen met omgevingsbediening of die beperkte mogelijkheden willen. De vriendelijke interface is de perfecte introductie om de wereld om u heen te leren bedienen.

Volledige compatibiliteit

Omgevingsbediening in Grid 3 is compatibel met alle populaire omgevingsbediening merken, waaronder GEWA, Eldat, EvoAssist, IRTrans, Z-Wave en UIIRT.

Nood sms-functie

De nieuwe Nood sms-functie stelt u in staat om hulp te vragen via tekstboodschappen, in slechts één selectie met behulp van een Android-telefoon.


COMPUTERBEDIENING

Computerbediening in Grid 3 zet u op de bestuurdersstoel en biedt u alles wat u nodig hebt om toegang te krijgen tot uw computer met oogbesturing, aanwijsapparaten of schakelaars. Er zijn grid sets waarmee u iedere toepassing kunt besturen die u thuis, op school of op het werk nodig hebt.



Zoom to click

Zoom to click is een nieuwe manier om te klikken als u oogbesturing of een hoofdaanwijzer gebruikt. Zoom to click biedt u een ongekennde precisie, zonder afbreuk te doen aan de snelheid. Kies gewoon het gewenste type muisklik, en kijk dan naar het gebied op het scherm waar u een keuze wilt maken.

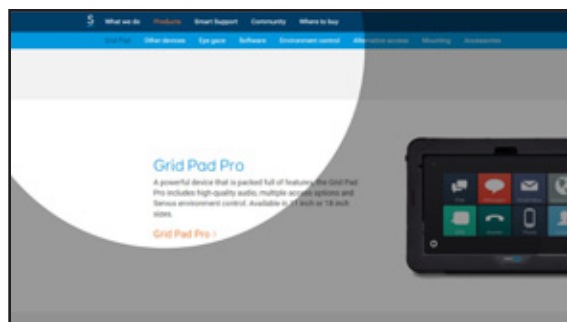



Dwell to click

Het populaire alternatief voor klikken, Dwell to click, is ook in Grid 3 beschikbaar. U kunt links klikken, rechts klikken, dubbelklikken of slepen, alles zonder fysiek een knop in te drukken.

Computerbediening voor schakelaars

Er is een aparte computerbediening set voor schakelaargebruikers. Elke toepassing is op maat gemaakt voor scannen, zodat u snel en nauwkeurig kunnen werken.

Meerdere schakelaars

Het is mogelijk vier schakelaars of een joystick te gebruiken voor omhoog, omlaag, naar links en rechts bewegen. Ook Schakelaar uitsluiten kan, waarbij de grids worden opgesplitst in groepen. Deze kunt u vervolgens direct met de bijbehorende schakelaar activeren.

Radarmuis

Met behulp van radarmuis kunt u de muisaanwijzer, bewegen, klikken, dubbelklikken of slepen met een vrijheid van 360 graden, allemaal met uw schakelaar. Activeer uw schakelaar wanneer de wijzerplaat wijst naar waar u met de muis naartoe wilt, kies de gewenste klik en maak uw keuze.

SwiftKey voorspelling

SwiftKey technologie werkt in alle Grid 3 Computerbediening toetsenborden, zodat u meer schrijven in minder selecties.

TOEGANKELIJKHEIDSOPTIES IN GRID 3


De toegankelijkheidsopties in Grid 3 zijn uitgebreid en intuïtief. Van aanwijsapparaten tot aanraakschermen, van oogbesturing tot schakelaars: Grid 3 heeft innovatieve nieuwe functies die alternatieve toegang eenvoudiger en efficiënter maken.

Grid 3 geeft u de controle

De diverse commando's in Grid 3 geven u de controle; u kunt verschillende toegankelijkheidsmethoden in- of uitschakelen, de snelheid en de tijdsinstelling van uw toegang aanpassen en zelfs uw oogbesturing herijken. Dit alles is mogelijk vanuit Grid 3, met uw alternatieve toegankelijkheidsmethode.

Aanwijsapparaten

Elk apparaat dat fungeert als een muis om de cursor te verplaatsen kan met Grid 3 worden gebruikt. U kunt kiezen hoe cellen zijn gemarkeerd, met opties voor het vergroten van een cel en het veranderen van de kleur van de rand of achtergrond.

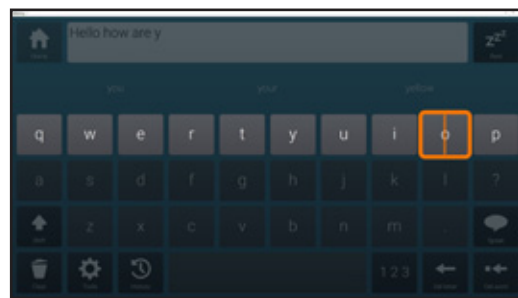

Aanraken

Als u Grid 3 via aanraking bedient heeft het instellingen om dingen makkelijker te maken. Er is een ingebouwd virtueel toetsenraster gecreëerd, dat ongewenste scherm-aanrakingen negeert. U kunt ook kiezen of u wilt dat uw eerste aanraking de selectie maakt, of wanneer u het scherm loslaat.

Oogbesturing

Grid 3 kan worden benaderd met behulp van verschillende oogbesturingcamera's. Oogbesturing instellingen zijn allemaal beschikbaar vanuit Grid 3, zodat u ze kunt aanpassen terwijl u bezig bent. De praktische Eye Gaze Monitor laat zien hoe u gepositioneerd bent ten opzichte van de camera en helpt u noodzakelijke aanpassingen te doen. Hoe u een selectie maakt, is ook aan u. In aanvulling op de Dwell visuele indicator, heeft u nu ook de mogelijkheid om de innovatieve nieuwe functie Zoom to Click te gebruiken, als u uw computer gebruikt.



Schakelaars

Scannen met schakelaars in Grid 3 is een nieuwe ervaring, met functies die tot nu toe niet beschikbaar waren, zoals de Scan Progress Indicator - een innovatief hulpmiddel dat u helpt te anticiperen wanneer het gewenste item wordt gemarkeerd.

Er zijn nog vele andere instellingen in Grid 3 om scannen voor u efficiënter te maken. U kunt cellen in blokken, rijen en kolommen groeperen, de scan automatisch of handmatig laten voortzetten, extra schakelaars gebruiken en tijdsinstellingen van de schakelaars aanpassen.

Meerdere schakelaars

Het is mogelijk vier schakelaars of een joystick te gebruiken voor omhoog, omlaag, naar links en rechts bewegen. Ook Schakelaar uitsluiten kan, waarbij de grids worden opgesplitst in groepen. Deze kunt u vervolgens direct met de bijbehorende schakelaar activeren.



Audio feedback

In Grid 3 kunt u ook audio-markering gebruiken, zodat een beschrijving van de cel of een geluid wordt afgespeeld voordat u een keuze maakt. Audio-markering kan een ander audio-apparaat gebruiken voor uw belangrijkste spraakuitvoer, zodat u een bedrade hoofdtelefoon of Bluetooth-headset voor audio-markering kunt gebruiken en een luidere luidspreker voor uw stem.

Ontworpen voor toegang

Grid 3 is ontworpen om moeiteloos te werken met ieder type alternatieve toegang. Omdat tijdens de ontwikkeling rekening is gehouden met de toegankelijkheid zijn alle functies en instellingen geïntegreerd en eenvoudig aan te passen als uw behoeften veranderen.

BEWERKEN OP AFSTAND

De nieuwe cloud service betekent dat iedereen overal vandaan kan inloggen en uw grid sets kan bewerken. Er is geen limiet aan het aantal mensen dat grids kan bewerken en uw heeft niet eens een licentie voor Grid 3 nodig gebruik te maken van Bewerken op afstand.

DEEL UW GRIDS MET DE WERELD

U kunt lid worden van de Online Grids gemeenschap en grid sets van andere gebruikers rechtstreeks downloaden in Grid 3, of uw grids sets delen met andere gebruikers over de hele wereld. Grids delen of toevoegen, het kan allemaal eenvoudig vanuit Grid 3.

U kunt ook gebruik maken van de cloud-diensten om uw grids sets naar Grid Player, onze app voor iOS-apparaten, te versturen.

Artikelnummer:

0503-00

GRID3 voor communicatie en omgevingsbediening

GRID PAD 8 - 10 - 12 - TOUCH PAD


start het gesprek



De Grid Pad biedt de ultieme oplossing voor gebruikers van alternatieve communicatietechnologie en is ontworpen voor communicatie de hele dag, iedere dag, met behulp van elke toegangsmethode.

De nieuwe Grid Pad reeks is speciaal ontworpen in samenwerking met OC-gebruikers.

Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit enkele varianten: Grid Pad 8, 10, 12 of Touch Pad

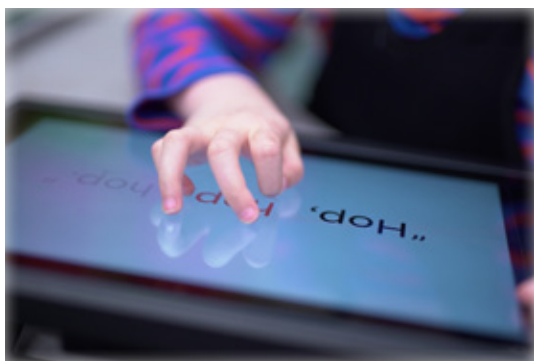

GRID PAD 12

Grid Pad 12 is het toonaangevende communicatiehulpmiddel. Het is gebouwd op een hoogstaand computerplatform en is geschikt voor alle belangrijke oogbesturingcamera's. Dit speciale apparaat heeft een lange batterijlevensduur van 15 uur, een robuust ontwerp en meerdere toegangsmogelijkheden om ervoor te zorgen dat u altijd uw stem hebt.

Belangrijkste toepassingen Grid Pad 12

- Hoge prestatie computerplatform voor snelle communicatie
- 15 uur batterijduur (10 uur met oogbesturing)
- Klaar voor gebruik met oogbesturing, schakelaars, aanraken en USB apparaten
- Schokbescherming, valbestendig tot 1 meter
- 12,5" full HD anti-refleterend aanraakscherm
- Aan/uit knop met afstandstandbediening
- Hoge kwaliteit versterkt geluid
- Ingebouwde radiofrequent en Infra Rood omgevingsbediening
- Tactiele, waterbestendige knoppen op praktische locaties
- Multi-hoek standaard en rolstoelbevestiging



Aan/uit afstandsbediening

Toegang met oogbesturing

Grid Pad 12 werkt met alle vooraanstaande oogbesturingstechnologieën.

Een speciaal ontwikkelde oogbesturingsmodule is beschikbaar voor de EyeTech TM5 of Irisbond Duo camera. Deze module verandert de Grid Pad 12 in een geïntegreerd communicatiehulpmiddel voor oogbesturing. Voor de Alea Intelligaze is een beugel beschikbaar.



Grid Pad 12



Adapter voor TM5 of Irisbond



GRID PAD 8 EN 10

Grid Pad 8 en Grid Pad 10 zijn kleinere en lichtere alternatieven voor Grid Pad 12. Deze draagbare apparaten met meerdere toegangsopties worden geleverd in een robuuste behuizing en kunnen worden gemonteerd of gebruikt met een schouderriem en handvat.



Grid Pad 10



Grid Pad 8

Belangrijkste toepassingen

- Draagbaar, multi-toegankelijk communicatiehulpmiddel
- Klaar voor gebruik met aanraken, schakelaars en USB apparaten
- Hoge kwaliteit versterkt geluid
- 10"/8" HD stevig aanraakscherm
- Ingebouwde radiofrequent en Infra Rood omgevingsbediening
- Rolstoelbevestiging en ingebouwde standaard
- Schouderband en handgreep
- Robuuste behuizing
- Geleverd met Grid 3

EIGENSCHAPPEN GRID PADS 8-10-12

Schakelaar invoer

Er zijn twee ingebouwde poorten voor schakelaars. Deze speciaal versterkte poorten zijn ook verzonken voor extra bescherming.

Auditieve terugkoppeling

De hoofdtelefoonaansluiting kan worden gebruikt voor auditieve terugkoppeling, handig voor mensen met een visuele beperking. In Grid 3 kunt u horen wat een cel zal zeggen voordat u ervoor kiest om het te selecteren.

Gebouwd om gehoord te worden

De geïntegreerde luidsprekers van Grid Pad zijn ontworpen om geluid en volume van hoge kwaliteit te produceren - om uw boodschap effectief over te brengen, waar u ook bent.

Montage- en positioneringsopties

De montagemogelijkheden van Rehadapt en Daessy bieden u keuze en flexibiliteit in elke omgeving.

Omgevingsbediening

Grid Pad wordt geleverd met ingebouwde Infra Rood en radiofrequent omgevingsbediening. Op de Grid Pad 12 zit een Infra Rood leervenster aan de voorkant om het invoeren van opdrachten eenvoudiger te maken.

Er is een uitgebreide folder van Grid 3 beschikbaar. Kijk op onze website of vraag hem op.

Grid 3 gratis uitproberen

Op de website www.thinksmartbox.nl leest u hoe u Grid 3 software **60 dagen gratis** kunt uitproberen.





GRID PAD TOUCH PAD

Touch Pad is een lichtgewicht apparaat dat gemaakt is om met aanraken te bedienen met aanraken. Het is perfect voor gebruikers die een krachtig en draagbaar apparaat met een lange batterijduur en een luidspreker nodig hebben.



Handvat

Voor een goede draagbaarheid is het apparaat afgewerkt met rubber. Dit zorgt voor comfortabele grip en voorkomt dat het apparaat van de tafel glijdt.

Montageplaat optie

Een gecombineerde Rehadapt & Daessy-montageplaat is beschikbaar als optionele extra.

Standaard


De instelbare ingebouwde standaard kan worden aangepast voor gebruik op een bureau of een vlakke ondergrond.

Robuuste koffer

Touch Pad wordt beschermd door een robuuste behuizing (valtest tot 1 m), waardoor deze robuust en duurzaam is en geschikt voor communicatie onderweg.

Belangrijkste toepassingen

- Snelle en draagbare communicatie
- Snelle Intel-processor
- 8 uur batterijduur
- Lichtgewicht apparaat van 1 kg
- 10" anti-schittering scherm
- Luide en heldere luidspreker
- Robuuste beschermhoes
- Toetsenraster compatibel
- Magnetische laadpoorten
- Geschikt voor Grid 3

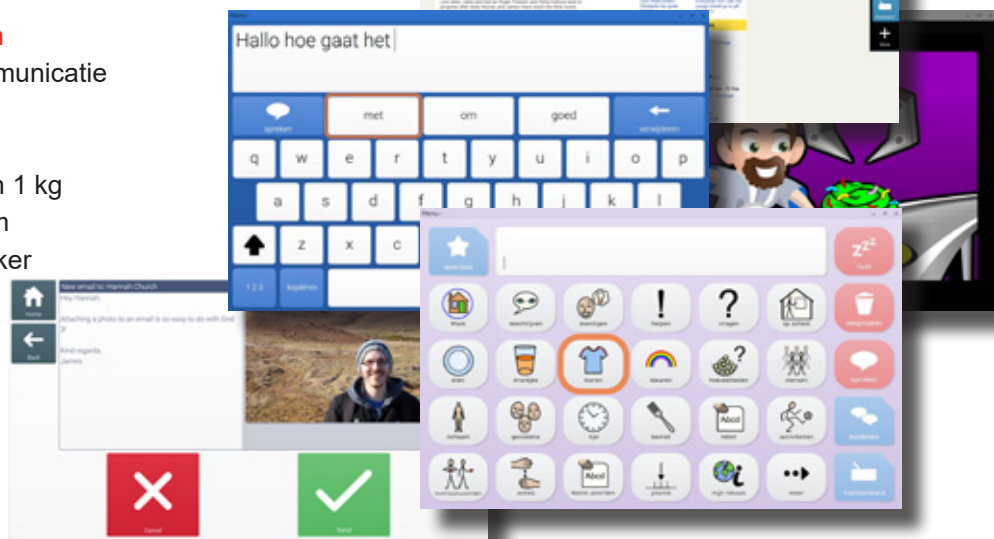

GRID 3

Grid 3 software stelt mensen met een handicap over de hele wereld in staat om te communiceren, hun omgeving te bedienen en hun Windows-computer te besturen. U kunt Grid 3 gebruiken met elk type toegang: oogbesturing, aanraken, directe selectie, aanwijzer en/of schakelaar.

Voor de verschillende niveaus van geletterdheid zijn grid sets ontwikkeld. Van actie-reactie training tot volledige geletterdheid. Voor mensen die met symbolen communiceren en/of met tekst. Voor gebruik van social media, of het leren met spelletjes, van omgevingsbediening tot het bedienen van de computer.

Artikelnummer

0544-08-01	Grid Pad 8
0544-10-03	Grid Pad 10
0544-12-02	Grid Pad 12
0544-10-ST	Grid Pad Touch Pad
0503-00	Grid 3

Voor mogelijkheden met een iPad hebben we een afzonderlijke folder gemaakt: Grid for iPad.



VERGELIJKING GRID PADS

	Touch Pad	Grid Pad 8	Grid Pad 10	Grid Pad 12
HD-weergave	10"	8"	10"	12"
Gewicht	1 kg	1,2 kg	1,4 kg	2,7 kg
Batterijduur	8 uur	4 uur	7 uur	15 uur
Procesor	Intel®Pentium Gold 4415Y 1.6GHz	Atom z3795 1.6GHz (2.4GHz Burst)	Atom z3795 1.6GHz (2.4GHz Burst)	Intel® Core™ i5-7Y54 3.2 GHz
Geheugen / RAM	4GB	4GB	4GB	8GB
USB-poorten	1 X USB C	2 X USB 2.0	2 X USB 2.0	1 X USB 2.0, 1 x USB 3.0
Windows 10	X	X	X	X
Grid 3	X	X	X	X
Tabletcamera	X	X	X	X
Aan / uit-knop op afstand				X
Oogbesturing				X
Schakelaar		X	X	X
Hoofdtelefoon-poort	X	X	X	X
Omgevings-bediening		X	X	X
Monteerbaar	X	X	X	X
Draagbaar	X	X	X	
Schouderriem en stoere tas	X	X	X	

GRID FOR IPAD

Communicatie-app voor iOS

Grid for iPad is dé communicatie-app die een stem geeft aan iedereen zonder spraak. Het biedt een complete oplossing voor ondersteunde communicatie op basis van symbolen en tekst. De app bevat sets voor verschillende leeftijden, mogelijkheden en niveaus van geletterdheid. De app is beschikbaar als een eenmalig aankoop- of maandabonnement via de Apple App Store.



**30 dagen gratis uitproberen
via de App store**

Ondersteunde communicatie voor iedereen

Grid for iPad is geschikt voor mensen met verschillende communicatiebehoeften, zoals: ALS / MND, autisme, cerebrale parese, syndroom van Down, leermoeilijkheden en beroerte / afasie.

Grid for iPad is wereldwijd beschikbaar in 16 talen. De flexibele prijsbepaling betekent dat u de app kunt betalen met een maandelijks abonnement of een eenmalige aankoop.



Belangrijkste kenmerken

- Veel verschillende bronnen voor verschillende leeftijden en vaardigheden
- Ondersteunde communicatie op basis van symbolen en tekst
- Snel en intuïtief bewerken binnen de app
- Account bewerken vanaf elke Windows-computer
- Doe meer met Grid - elke dag nieuwe bronnen toegevoegd
- Verkrijgbaar in 16 talen
- Backup in cloud
- Standaard ondersteuning PCS symbolen

Elke dag nieuwe bronnen toegevoegd

Grid for iPad biedt toegang tot onze gratis online bronnenwinkel, Online Grids, waar u honderden kant-en-klare grid sets kunt downloaden.

Ontdek elke dag nieuwe content, toegevoegd door behandelaars en Grid-gebruikers wereldwijd.



In-app bewerken

U kunt snel een eenvoudig bestaande sets bewerken of helemaal opnieuw beginnen en uw eigen grids maken. Pas alles aan, van het ontwerp van uw grid, tot het uiterlijk van uw cellen en de symbolen die u gebruikt. Met Grid for iPad kunt u snel nieuwe vocabulaires toevoegen aan bestaande grid sets.



Combineren met Grid 3

Maak een Smartbox-account om inhoud automatisch te synchroniseren tussen Grid for iPad en Grid 3.

Uw instellingen en sets wordt opgeslagen in de cloud. Hierdoor worden alle wijzigingen die u aanbrengt in uw grid sets en instellingen op beide platforms bijgewerkt.

Dit houdt ook in dat er een back-up is gemaakt van uw grid sets. Als er iets met uw iPad gebeurt, verliest u uw inhoud niet.

Bewerken op afstand

Via Bewerken op afstand kan iedereen grid sets bewerken met Grid 3 op Windows.

U heeft hiervoor slechts de gratis proefversie van Grid 3 en de inloggegevens voor het Smartbox-account nodig. Voer de gewenste bewerkingen uit en de wijzigingen worden meteen in Grid for iPad weergegeven - zo eenvoudig!

Ondersteunde iPads

Grid for iPad is geschikt voor elke iPad met **iOS 11 en hoger**.

12,9" iPad Pro 1e en 2e generatie

10,5" iPad Pro


9,7" iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5e generatie, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2.

Uitproberen?

Ga naar de App store en kies voor een maandelijks abonnement. U kunt de app 30 dagen gratis uitproberen. Geef in de instellingen tijdig aan dat u de app niet wilt bestellen, anders wordt de proefperiode door Apple omgezet naar een maandabonnement.

Bestellen?

Ga naar de App store en kies voor eenmalige aanschaf of een maandelijks abonnement. Of vraag een zorgverzekeraarsverstrekking bij ons aan.

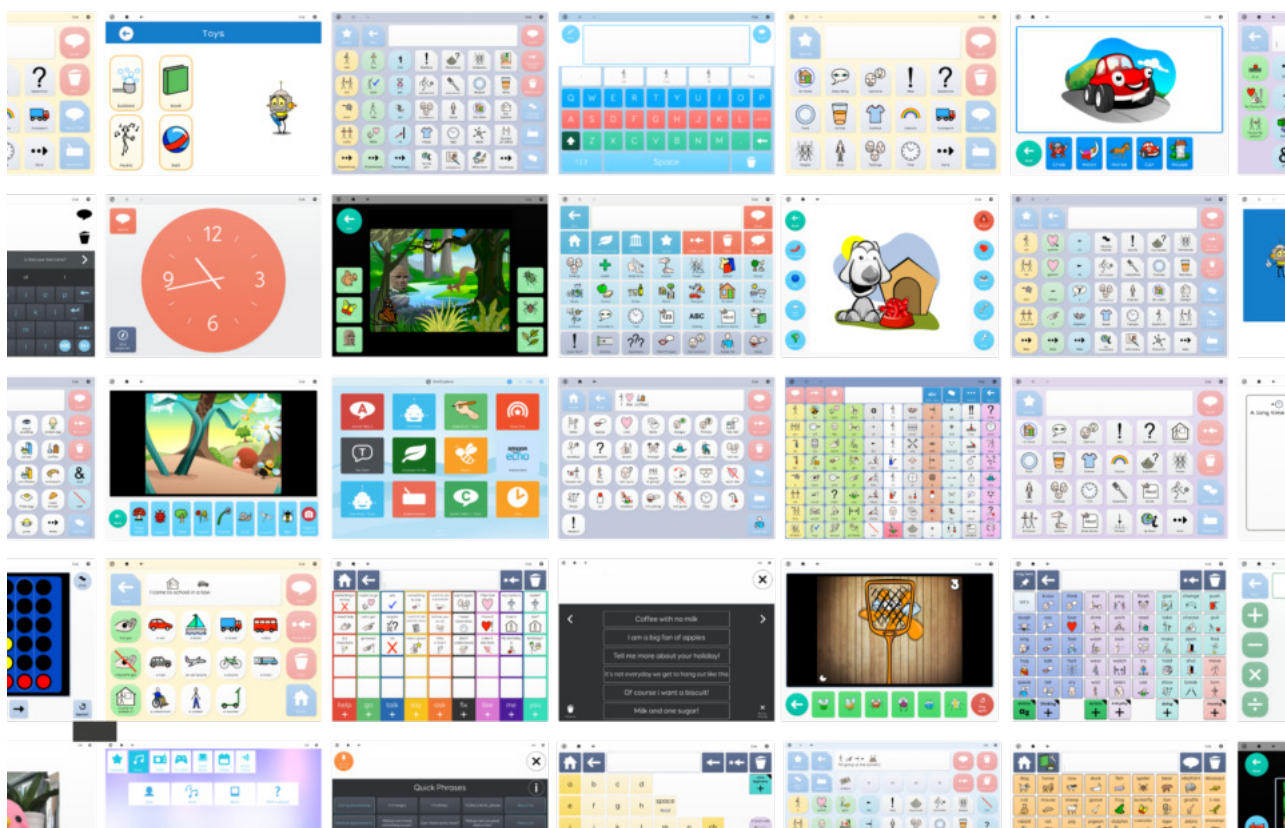

SPEECH CASE

uw iPad wordt een echte communicatie oplossing!

De Speech Case en Speech Case Pro zijn behuizingen voor ondersteunde communicatie (OC) die speciaal zijn ontworpen voor Apple iPad® 9.7" of iPad Pro® 12.9". De Speech Case en Speech Case Pro hebben krachtige, geïntegreerde luidsprekers, een ergonomisch en duurzaam ontwerp, ondersteunen het gebruik van schakelaars en meer.



Vertrouwde technologie

...voor gebruikers die de voorkeur geven aan het iOS-besturingssysteem. Hierdoor is er geen leercurve en kunt u snel aan de slag.

Ongeëvenaard geluid

...van de geïntegreerde, naar buiten gerichte luidsprekers. De kwaliteit en helderheid zijn geoptimaliseerd voor spraak. Tegelijkertijd bieden de luidsprekers het luidste geluid op de markt.

Ervaar ultieme duurzaamheid en draagbaarheid

...dankzij een speciaal ontworpen behuizing met ingebouwde handgreep en steun. Montage is ook mogelijk met voorgeboorde schroefgaten voor een externe montageplaat zoals Daessy en Rehadapt.

Meerdere toegangsmethoden

...zoals schakelaarscannen, directe selectie en aanraken met behulp van toetsenrasters zijn allemaal mogelijk met de Speech Case en Speech Case Pro.

Opties

De Speech Case en Speech Case Pro zijn verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: Groenblauw, Framboos, Staalgrijs.

Productspecificaties:

Model	Speech Case / Speech Case Pro
Hardware	Ondersteunt 5 ^e en 6 ^e generatie iPad 9.7" / 2 ^e generatie iPad Pro 12.9"
Gewicht	570 g / 816 g
Afmetingen	249 x 182 x 46 / 316 x 234 x 46 mm
Luidsprekers	2 x 31 mm 4 ohm, 3,5 W
Aansluitingen	Micro USB (opladen), hoofdtelefoon, 2 schakelaarpooten
Knoppen	1 x inschakelen 1 x volume hoger en volume lager
Bluetooth	Bluetooth 3.0
Voeding	15,54 Wh Lithium-ionbatterij
Batterijduur	> 10 uur bij normaal gebruik
Oplaadtijd	< 4 uur



Voorbeeld bedienschakelaar:
KAJO Button



Modellen

De Speech Case is alleen compatibel met 9,7" 5^e en 6^e generatie iPad.

De Speech Case Pro is alleen compatibel met 12,9" 2^e generatie iPad Pro.

Artikelnummer:

TDY-113500 Speech Case 9,7 Groenblauw

TDY-113501 Speech Case 9,7 Staalgrijs

TDY-113502 Speech Case 9,7 Framboos

TDY-113503 Speech Case 12,9 Groenblauw

TDY-113504 Speech Case 12,9 Staalgrijs

TDY-113505 Speech Case 12,9 Framboos



INDI 7 EN I-110

de alles-in-één spraakoplossing voor communicatie



Twee apparaten die in sommige eigenschappen verschillen, maar ook veel overeenkomsten hebben. Het belangrijkste is dat ze bestemd zijn voor ondersteunde communicatie (OC), zeer luide luidsprekers hebben en met behulp van de Grid 3 software een volledige integratie bieden voor communicatie, computerbesturing en omgevingsbediening.

Geletterd of ongeletterd, communicerend met symbolen of tekst, statisch of nog ontwikkelend: met dit communicatieapparaat kunt u uit de voeten.

INDI 7

Indi 7 is een Windows spraakapparaat voor op tekst of symbolen gebaseerde communicatie.



De eigenschappen van Indi 7:

- wordt geleverd met Grid 3 software
- eenvoudig draagbaar en ergonomisch ontwerp
- tal van invoermogelijkheden, zoals schakelaarscanning, hoofdmuis, aanraken met behulp van toetsenrasters, et cetera
- krachtige, naar buiten gerichte, ingebouwde luidsprekers voor heldere spraak, uitzonderlijk luide uitvoer en veel authentiek klinkende stemmen
- mogelijkheden die verder gaan dan spraakcommunicatie, zoals omgevingsbediening, Infra Rood, toegang tot sociale media, e-mail en sms-en



Voorbeeld bedienschakelaar:
KAJO Button

I-110

De I-110 is het ultieme spraakuitvoerapparaat voor Ondersteunde Communicatie (OC), en is gemaakt voor het echte leven. Dankzij een speciaal ontwikkelde, ultra-robuste behuizing, een natuurlijk intuïtieve gebruikersinterface en een IP54-classificatie (stofbestendig en plensdicht), biedt de I-110 uitzonderlijke duurzaamheid, prestaties en betrouwbaarheid.



De I-110 geeft u de zekerheid en de vrijheid om te communiceren waar en wanneer u maar wilt, waardoor u in staat bent grenzen te doorbreken en het leven op uw voorwaarden te verkennen.

De eigenschappen van I-110:

- slank, duurzaam en waterbestendig ontwerp dat bestand is tegen vallen en morsen, zelfs zonder een beschermhoes
- ingebouwde steun en talloze invoermethoden, niet alleen directe selectie, maar ook schakelaarscanning, hoofdmuis en aanraken met gebruik van toetsenrasters, enzovoorts
- naar buiten gerichte luidsprekers die een krachtig geluid en duidelijke spraak bieden in elke omgeving, zelfs door een ruimte of in het publiek
- voorzien van Infra Rood zender voor omgevingsbedieningsfuncties



Productspecificaties Indi 7

Model	Indi 7
Besturing	Microsoft Windows 10 Pro
Scherm	7" (1920 x 1200 px)
Afmeting	20,3 x 14,5 x 3,65 cm
Tast	Multi-punts capacatieve aanraking
Gewicht	576 gram
Luidspreker	2 x 31 mm, 4 Ohm, 3,5 W
Microfoon	1 x analoog
Processor	Intel Atom Z8350 - 4 kernen, 2 Mb cache, 1,92Ghz
RAM	4 GB RAM
Flash-opslag	64 GB eMMC
Infra Rood	Omgevingsbediening middenachter
Sensoren	3-assige gyro, accelerometer, kompas, omgevingslicht sensor
Knoppen	1x inschakelen 1 x volume hoger en volume lager
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n
Bluetooth	4.0 / BLE
Camera	Achterzijde: 5 megapixel Voorzijde: 1,3 Megapixel
Aansluitingen	1 Micro USB 2.0 Hoofdtelefoon / Microfoon 12V DC opladen
Voeding	Ingebouwde 23,7 Wh Lithium ion accu
Batterijduur	> 8 uur bij normaal gebruik
Oplaadtijd	< 4 uur
Windowstaal	Ondersteunt alle Windows 10-talen en taalpakketten (downloaden kan nodig zijn)



Zijkant Indi 7



Zijkant I-110

Productspecificaties I-110

Model	I-110
Besturing	Microsoft® Windows 10 Pro
Scherm	10,1" (1920 x 1200 px)
Afmeting	257 x 185 x 35 mm
Flash opslag	128 GB eMMC
Gewicht	1.100 gram
Luidsprekers	2 x Geïntegreerde luidsprekers
Microfoon	1 x 3,5 mm Microfoon / Hoofdtelefoon
Processor	Intel Atom x5-Z8350
RAM	4 GB Camera
Infra Rood	4 zenderposities
Duurzaamheid	Gorilla® Glass, IP54 beschermingsgraad, Valtest getest bij 1,5 m Magnesium chassis
Knoppen	1 x aan/uit 1 x volume hoger en lager
Draadloos	WLAN
Bluetooth	Bluetooth 4.0 / BLE
Camera	Achterzijde: 8 Megapixels Voorzijde: 2 Megapixels
Aansluitingen	1 x USB 3.0 volledige grootte 2 x 3,5 mm Schakelpoorten Hoofdtelefoon / Microfoonaansluiting 15 VDC-oplaadpoort
Batterijtype	4090 mAh
Batterijduur	> 10 uur bij normaal gebruik
Oplaadtijd	< 4 uur
Windowstaal	Ondersteunt alle Windows 10-talen en taalpakketten (downloaden kan nodig zijn)

Grid 3 heeft zoveel mogelijkheden (en zoveel leuke ook!) dat we daar een aparte folder over hebben.

Artikelnummer

TDY-113389	Indi 7
TDY-113415	I-110 met Grid 3
0503-00	Grid 3 voor communicatie en omgevingsbediening
KAJ-KB50-77B	Kajo schakelaar zwart 50mm, 150g, 75cm kabel

I-13 EN -16

met de ogen bedienbaar spraakuitvoerapparaat

Open een wereld aan mogelijkheden met de kracht van communicatie. De I-13 en I-16 zijn apparaten voor ondersteunde communicatie (OC).



Wees onafhankelijk

Haal alles uit uw mogelijkheden met ooggestuurde communicatie, computertoegang en omgevingsbediening. De I-13 en I-16 zijn de nieuwste spraakuitvoer apparaten in de I-serie. De apparaten zijn ontwikkeld om mee aan te passen met uw veranderende behoeften - hoe gewoon of buitengewoon ook.

Gebouwd voor OC

- Toegang tot het apparaat via schakelaar of aanraking
- Duurzaam, waterdicht ontwerp voor extra bescherming
- Naar achteren gericht Partner Window™ voor natuurlijke gesprekken
- Snelle Intel Core i5-processor
- Lichtgewicht voor betere mobiliteit
- Krachtige ingebouwde luidsprekers

Speciale functies

- Verminderde schermstijging voor gebruik buitenshuis
- Schakel uw apparaat zelfstandig aan en uit
- Eenvoudige bevestiging aan rolstoel of rechtop plaatsen in de door u gewenste hoek
- Beheer uw omgeving inclusief deuren, verlichting en telefoon
- Personaliseer uw apparaat met aanpasbare knoppen

Wat zit er in de doos?

- I-13 of I-16 apparaat
- Verstelbare basis
- Lader
- ConnectIT montageplaat
- Aan de slag-gids
- Trainingskaarten



Aanvullende accessoires

Extra en reserve / vervangende accessoires:

- Toetsenrasters & Toetsenrasterhouders
- Verstelbare basis
- Lader met netsnoer
- ConnectIT naar Daessy Aanpassingset
- Reistas



Meerdere toegangsmethoden



Duurzaam



Partner venster



Snel



Productspecificatie

I-13

Scherms	13,3", 16:9
Afmetingen	33,8 x 24,1 x 8,1 cm
Gewicht	2,3 kg
Batterijduur	9 uur
IP54	1,1 meter

I-16

Scherms	15,6", 16:9
Afmetingen	39,1 x 26,9 x 8,4 cm
Gewicht	2,8 kg
Batterijduur	8 uur
IP54	0,8 meter

I-13 én I-16

Schermsresolutie	1920 x 1080
Aanraakpaneel	Projected Capacitive Touch met Gorilla® Glass, 10 punts multi touch
Scherms achter	480 x 128 pixels
Luidsprekers	2 x 10W Closed Box
Microfoon	1 x voorzijde
Processor	Intel Core i5 7200U
RAM	8 GB LPDDR4
Besturing	Microsoft Windows 10
Harde schijf	256 GB, SATA based SSD
Aansluitingen	2 x USB 3.0
	2 x 3,5 mm schakelaar aansluiting interface
	1 x 3,5 mm hoofdtelefoon jack (stereo), met jack detectie
	1 x 19V DC in 2,5/5,5 mm Laadpoort

Fysieke knoppen 1 x Aan

1 x Volume omhoog

1 x Volume omlaag

2 x Programmeerbaar

WLAN (opt) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth® (opt) Bluetooth® 4.1

Infra Rood Vishay TSMP77000 Upright

Oriëntatie: 1 x IR filter scherm met

6 x IR Transmit Diodes

Camera's Gebruiker (achterzijde): 8 MP AF

Web (voorzijde): 2 MP FF

Oogbesturing (Opt)

Tobii IS5 Module

Oplaaadtijd Maximum 5,4 uur (0-100%)

Bureaustand. Geïntegreerd

Ondersteund montagesysteem

Tobii Dynavox QR adapterplaat

voor Daessy en REHAdapt

Voeding 65W AC adapter

Artikelnummer

TDY-113640 I-13 Touch

TDY-113670 I-16 Touch




BOARDMAKER FAMILIE

communicatie- en lesmaterialen maken met symbolen

Boardmaker versie 6.0 is een ongelooflijk flexibel en krachtig middel om symbool gebaseerde materialen te maken en printen.

Boardmaker software is uitermate geschikt voor docenten om geprinte communicatie- en lesmaterialen op basis van symbolen te maken. Boardmaker is combinatie van een tekenprogramma met een grafische database en bevat meer dan 4500 PCS symbolen in zwart/wit en kleur, alle in 44 talen.

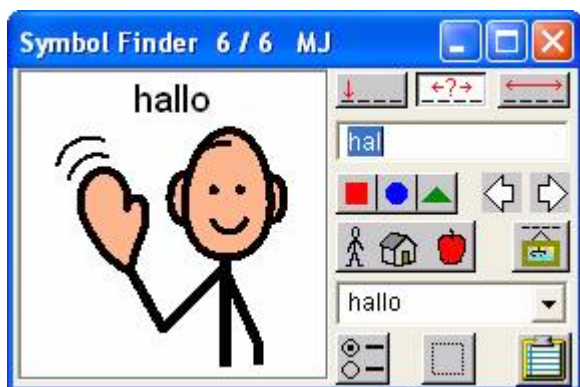

Boardmaker is ideaal om symbolenmaterialen mee te maken, zoals communicatieborden voor gebruikers van ondersteunende communicatie, visuele schema's en sociale vaardigheidsondersteuning voor kinderen met aan autisme verwante stoornissen, boeken en symbool-ondersteunde leesoefeningen voor beginnende en aanvankelijke lezers, lied- en verhaalborden voor peuters en kleuters en in het algemeen: materialen ten behoeve van leerlingen/studenten met speciale onderwijsbehoeften.

Door het toevoegen van meer symbolen, tekeningen of digitale afbeeldingen aan de basisbibliotheek zijn de communicatiemogelijkheden onbeperkt.

Eigenschappen:

- Snel pictogrammen opzoeken met een muis.
- Pictogrammen maken in elke gewenste grootte.
- Afdrukken en bewaren van de kopie op schijf voor later gebruik.
- Afdrukken in zwart/wit of kleur.
- Opslaan, naam geven, terugvinden, formaat aanpassen van geplakte pictogrammen die gescand zijn of getekend in de computer.
- Het maken van dossiers, pictogrammen / instructiebladen, leesboeken, journalen of posters. Dit kan gemaakt worden in Boardmaker of door plakken van pictogrammen in uw computer publicatieprogramma.

Taalkenmerken van Boardmaker:

Elk symbool is vertaald in 44 talen en kan gevonden en afgedrukt worden in elke taal die u wilt. Het betekent dat u een communicatiebord in het Spaans kunt maken (of elke andere beschikbare taal, waaronder Nederlands) zonder te weten hoe u de taal uit moet spreken.

Symbolen kunnen gekopieerd worden met:

- geen tekst boven het symbool;
- een taal boven het symbool;
- twee talen naar keuze boven het symbool.

Er is een teksthulpmiddel voor het bewerken van alle schermen, menu's en commando's in elke taal.

Minimale systeemeisen:


- Minimaal Pentium II
- Windows 2000, XP, 7 of 8
- 256 MB of RAM
- 1 GB harde schijf ruimte
- Printer
- CD-rom speler






BOARDMAKER PLUS

Boardmaker® Plus! biedt dezelfde functies als Boardmaker® voor het maken van af te drukken materialen, en daar stopt het niet. Boardmaker®Plus! transformeert uw papieren activiteiten - en de leerervaring van uw leerlingen - door uw activiteiten interactief te maken voor gebruik op de computer met geluid, animatie en video.

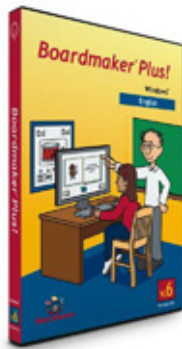

Met Boardmaker® Plus! kunt u dezelfde materialen maken die u met Boardmaker® maakt, - oefeningen, werkbladen, plannings, boeken, schrijfactiviteiten, games en meer, in 44 talen. En met Boardmaker® Plus! kunt u ze laten praten, vragen stellen en uw studenten ondersteunen tijdens het leren.

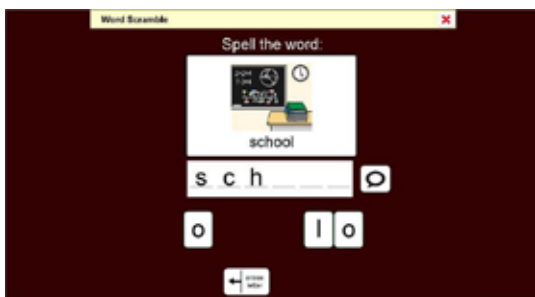

BOARDMAKER STUDIO

Een slimme en krachtige oplossing voor uw klaslokaal. Besteed minder tijd en bereik meer met de nieuwe Boardmaker Studio - de meest veelzijdige Boardmaker oplossing. Met de mogelijkheid om offline te werken of verbinding te maken met uw Boardmaker Online-account, is het maken van lesmaterialen nog nooit zo eenvoudig geweest. Studio biedt nog steeds uw favoriete Boardmaker Software Family-functies, zoals krachtige bewerkingstools, maar biedt u nu toegang tot meer dan 30.000 Picture Communication-symbolen (PCS®).




Boardmaker Studio bevat ook functies die zijn ontworpen om u kostbare tijd te besparen, zoals honderden Studio Starter-sjablonen en een eenvoudig te begrijpen interface, zodat u minder tijd aan het maken van materiaal en meer tijd met uw leerlingen kunt besteden.






Snel boeiende activiteiten maken

- Meer dan 150 Studio Starter sjablonen, activiteiten op het scherm met voorgeprogrammeerde acties. Voeg eenvoudig symbolen, tekst, vragen, antwoorden of woordenschat toe aan de sjabloon en uw activiteit is klaar.
- Meer dan 100 gadgets, voorgeprogrammeerde knoppen en objecten die u naar de pagina van elke activiteit kunt slepen, ontworpen om u te helpen snel activiteiten op te bouwen en te verbeteren.

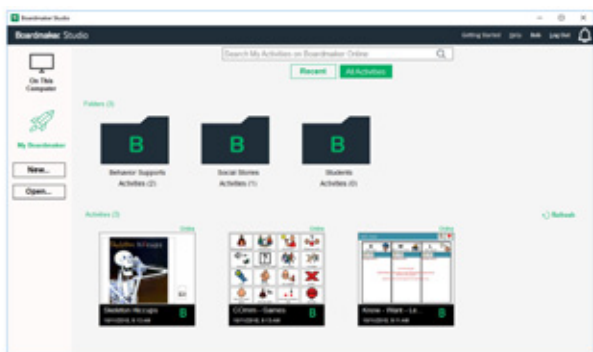

Eenvoudig te leren en gemakkelijk te gebruiken

- Gebruiksvriendelijke interface met een duidelijke werkbalk, intuïtieve menu's en pictogrammen, plus Studio Starter-sjablonen, gerangschikt op categorie.
- Al uw pagina's visueel in één oogopslag benaderen met behulp van het Projectvenster.

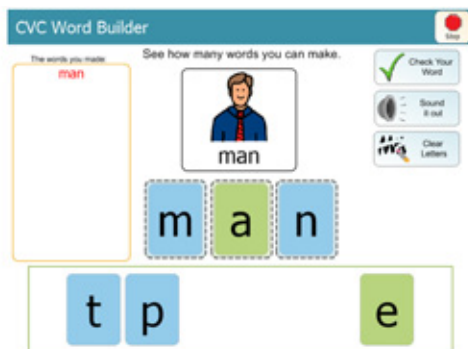

Altijd beschikbaar, waar dan ook

- Eenvoudig beheer en onderhoud voor grotere implementaties.
- Snellere, toepassingsrijke en stabiele bewerkingen voor offline gebruik plus de mogelijkheid om uw werk online te zetten met nieuwe naadloze Boardmaker Online-integratie.

Blijf verbonden

- Boardmaker Studio Dashboard is uw toegangspoort om een nieuwe activiteit vanaf nul te beginnen of vanuit een sjabloon, om toegang te krijgen tot lopende projecten of snel een activiteit in de afspeelmodus op het scherm te openen.
- Start een project in Boardmaker Studio en maak het af in Boardmaker Online, of andersom! Het dashboard geeft u direct online toegang tot al uw projecten en u kunt aan de slag.

Krijg de volledige ervaring.

Combineer de krachtige offline bewerkingsmodus van Boardmaker Studio met de robuuste functies van Boardmaker Online en er is geen limiet aan wat u en uw studenten kunnen bereiken.

Compatibel met Windows 7, 8 en 10.



BOARDMAKER® BACKGROUNDS

Boardmaker® Backgrounds biedt onbeperkte mogelijkheden voor taalactiviteiten - voor elke omgeving of gelegenheid! Gebruik meer dan 100 achtergrondscènes en:

- Pas taalactiviteiten en communicatieborden aan
- Bouw interactieve scènes
- Creëer of vertel verhalen opnieuw
- Maak schrijf prompts
- Vind verhaalstarters
- Beoordeel voltooide oefeningen
- En veel meer!



Termen en uitdrukkingen die functionele vaardigheden beschrijven, kunnen gegeneraliseerd worden voor elke gebruiker. Gebruik de achtergrondscènes voor af te drukken activiteiten of computeractiviteiten met geluid, animaties, pop-upborden en meerdere bordveranderingen.

PCS SYMBOLEN

Verzamel alle Picture Communication Symbols (PCS) voor de Boardmaker Software Family met de 2000-2012 PCS Addendum-bundel. Voeg meer dan 7.000 krachtige communicatiesymbolen toe aan de vooraf geladen PCS-symboolbibliotheek op uw Boardmaker-producten. De PCS Addendum-bundel biedt een breed scala aan onderwerpen zoals dieren, eten, dagelijks leven, kleding, sport, spellen en schoolloopbaan en maakt het communiceren en deelnemen aan activiteiten in de klas gemakkelijker dan ooit!

Artikelnummer:

MAY-BOARDM-WIN1	Boardmaker (Win)
MAY-BOARDM-ADDB	PCS Classic 2000-2012 Bundel tbv Boardmaker (Win/Mac)
MAY-BOARDM-STUD	Boardmaker Studio (Win) USB
MAY-BOARDM-PLUE	Boardmaker Plus! (Win) UK e-mail
MAY-BOARDM-PLUS	Boardmaker Plus! (Win) UK USB
MAY-BOARDM-BACK	Boardmaker Background (Win)
MAY-BOARDM-BACS	Boardmaker Background Studio editie

HET ABCDE VAN QUOVADIS

Alarmeren, Bedienen, Communiceren, Dementie, Epilepsie

QuoVadis Nederland BV is een onafhankelijke Nederlandse organisatie met een totaalprogramma van medisch-technische hulpmiddelen voor communicatie en omgevingsbediening. QuoVadis (QVN) is sinds 1993 actief en opereert landelijk.

QuoVadis Nederland zorgt voor implementaties van hulpmiddelen voor het compenseren van lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps, waarbij de MENS centraal staat

QuoVadis heeft een uitgebreid assortiment. Om duidelijk te maken wat onze mogelijkheden zijn, hebben we dit ons ABCDE genoemd:

Het eerste onderdeel van ons ABC is **Alarmeren**.

A QuoVadis kan in veel verschillende situaties de alarmering verzorgen. Denk aan zelfstandig wonende ouderen, het gebruik in combinatie met omgevingsbediening, toepassing in zorginstellingen en bij epilepsie.

Het tweede deel van ons ABC en onze specialiteit is **Bedienen**.

B QuoVadis is gespecialiseerd in omgevingsbedieningen. Van simpele oplossingen tot uitgebreide systemen. Met omgevingsbediening kan een volledige woning aangestuurd worden, bijvoorbeeld met één knop. Zelfs als er sprake is van geen, of verminderde handfunctie. In dat geval bieden verschillende bedienschakelaars of zelfs oogbolbesturing uitkomst.

Het derde onderdeel van ons ABC is **Communiceren** en **Communicatiehulpmiddelen**.

C QuoVadis heeft verschillende oplossingen die ingezet kunnen worden bij communicatieproblemen en levert communicatiehulpmiddelen op basis van tekst, symbolen en combinaties daarvan.



Met de D richten we ons op oplossingen voor **Dementie**. Ouderen en mensen met afnemende mentale vermogens, bijvoorbeeld als gevolg van dementie, kunnen baat hebben bij tijd- en planhulpmiddelen, zwerfalarm, thuismonitoring.



Voor mensen met **Epilepsie** heeft QuoVadis verschillende oplossingen voor het monitoren van epileptische aanvallen in of buiten het bed. Zowel binnen- als buitenshuis wordt de benodigde en adequate communicatie naar zorgverleners geleverd.

Onze producten zijn volledig modulair en aan te passen aan de wensen en behoeften van de gebruiker. Vanzelfsprekend kunnen onze hulpmiddelen aangesloten worden op systemen van andere leveranciers, of hiervoor geschikt worden gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vele producten verwijzen wij u graag naar onze website: www.qvn.nl. Hier kunt u uitgebreide informatie vinden.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen per telefoon, 035 - 548 87 01 of email info@qvn.nl.



Deze informatie over
communicatie en geletterdheid
wordt u aangeboden door:



QuoVadis Nederland BV

Bezoekadres: Nieuw Baarnstraat 33, 3743 BN Baarn

Postadres: Postbus 171, 3740 AD Baarn

Telefoon: 035 548 87 01

E-mail: info@qvn.nl

Internet: www.qvn.nl