

## SCHAKELAAR FEEDBACK

zien of een schakelaar geactiveerd wordt

Wanneer iemand wil kunnen zien of een schakelaar geschikt is voor een gebruiker, of wanneer tijdens het gebruik merkbaar moet zijn of deze geactiveerd is, kan daarvoor gebruik gemaakt worden van de schakelaar feedbackunit.



### Juiste schakelaar vinden

Bij het indrukken van de schakelaar gaan lampjes branden en klinkt een zoemer.

Voor een begeleider is daarmee duidelijk dat de schakelaar geactiveerd kan worden binnen de mogelijkheden van de gebruiker.

### Terugkoppeling van activatie

Soms is het voor een gebruiker niet duidelijk of de schakelaar goed is ingedrukt. Zeker als deze bijvoorbeeld voor een zusteroproep wordt gebruikt, waarbij de gebruiker moet wachten op de volgende actie, is het fijn om te weten dat de knop goed werd ingedrukt.

Dankzij de lampjes en de zoemer wordt dat zichtbaar en hoorbaar.

De lampjes en zoemer worden geactiveerd zolang de schakelaar wordt ingedrukt. Wanneer deze wordt losgelaten, gaan lampjes en zoemer uit.

### Werking

#### Om te testen:

Steek de 3,5 mm jack connector van de schakelaar in ingang van de feedbackunit.



#### Voor terugkoppeling van geactiveerde schakelaar:

Steek de 3,5 mm jack connector van de schakelaar in ingang van de feedbackunit. Verbind de 3,5 mm uitgang van de feedback unit met het te activeren apparaat.



### Technische gegevens:

Afmetingen	1120 x 65 x 25 mm
Aansluiting	3,5 mm in
	3,5 mm uit
Voeding	9V batterij

### Artikelnummer:

**GNL-FEEDBACK**

Feedback unit, schakelaar tester