


Aan de slag met myAbilia en CARY Base



Aan de slag met myAbilia – stap voor stap

1. myAbilia account aanmaken

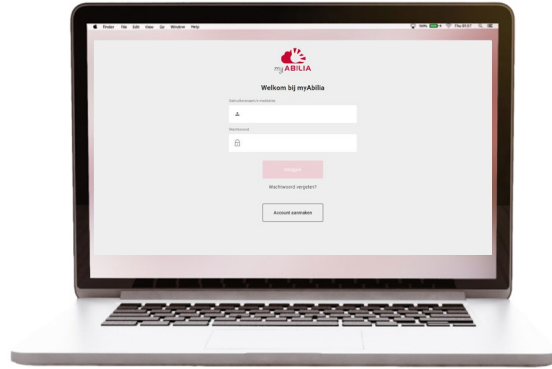


- Ga naar www.myabilia.com op een computer, mobiele telefoon of tablet.*
- Maak een gebruikersaccount aan op myAbilia.*
- Log in op myAbilia.*
- d) Selecteer de kalendermodule CARY.**
- e) Importeer de afbeeldingsbibliotheek CARY.**

2. CARY Base verbinden met myAbilia



Zorg ervoor dat het toestel is verbonden met Wi-Fi en meld u aan met de gebruikersaccount.

3. Activiteiten toevoegen

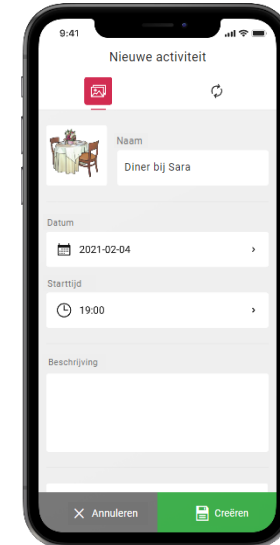


Log in op www.myabilia.com op een computer, mobiele telefoon of tablet.

Gebruik myAbilia om de agenda in CARY Base te beheren.

Als u meer hulp nodig hebt, volg dan de instructies in deze gids.

Maak een gebruikersaccount aan bij myAbilia

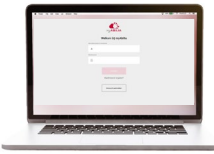

1. Open een webbrowser en ga naar www.myabilia.com.
2. Selecteer **Account aanmaken**.
3. Selecteer accounttype **Gebruiker** en volg de instructies.

www.myabilia.com



Welkom bij myAbilia

Gebruikersnaam/e-mailadres


Wachtwoord

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Account aanmaken


Inloggen bij myAbilia

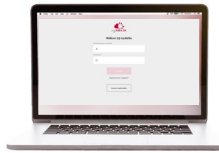


1. Open een webbrowser en ga naar www.myabilia.com.
2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Inloggen**.

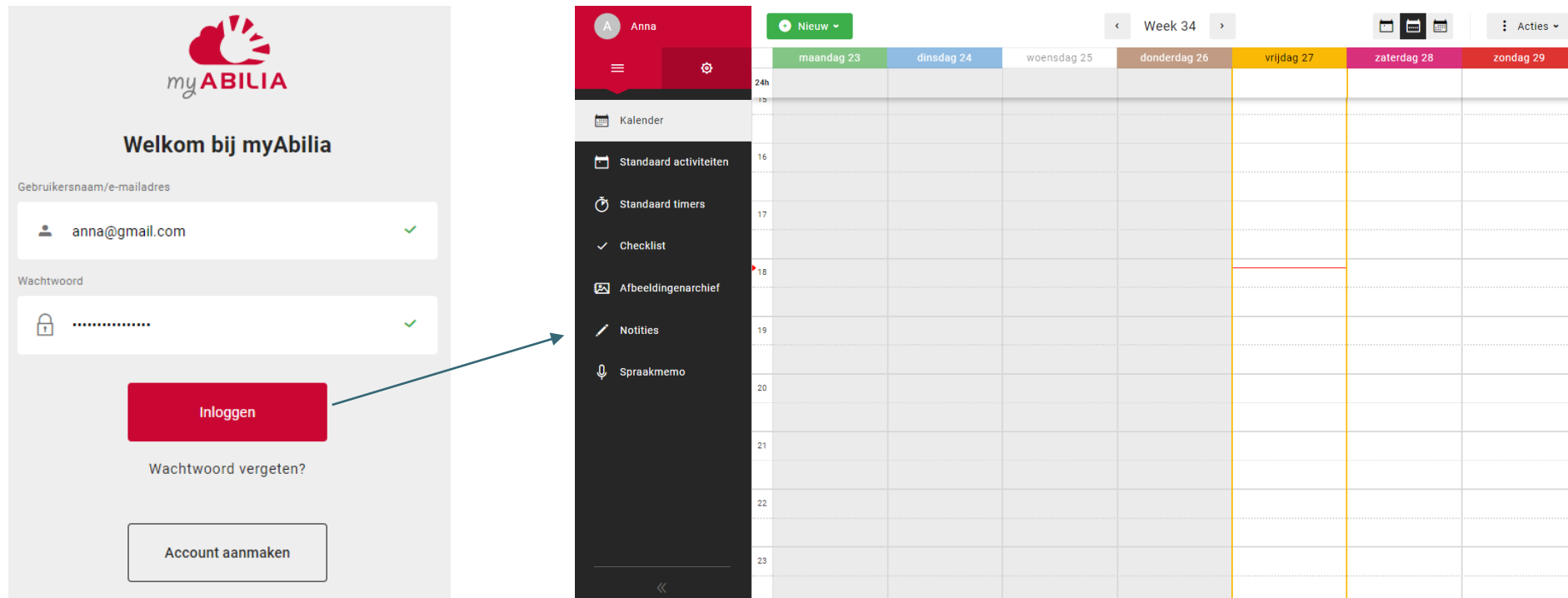


Selecteer de kalendermodule CARY

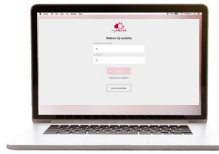


1. Selecteer  en **Mijn profiel** in het menu.
2. Selecteer de tab **Modules** en selecteer de modules bestemd voor CARY:
 - Kalender - CARY
 - Standaardactiviteiten
 - Afbeeldingsbibliotheek
3. Selecteer **Opslaan**.

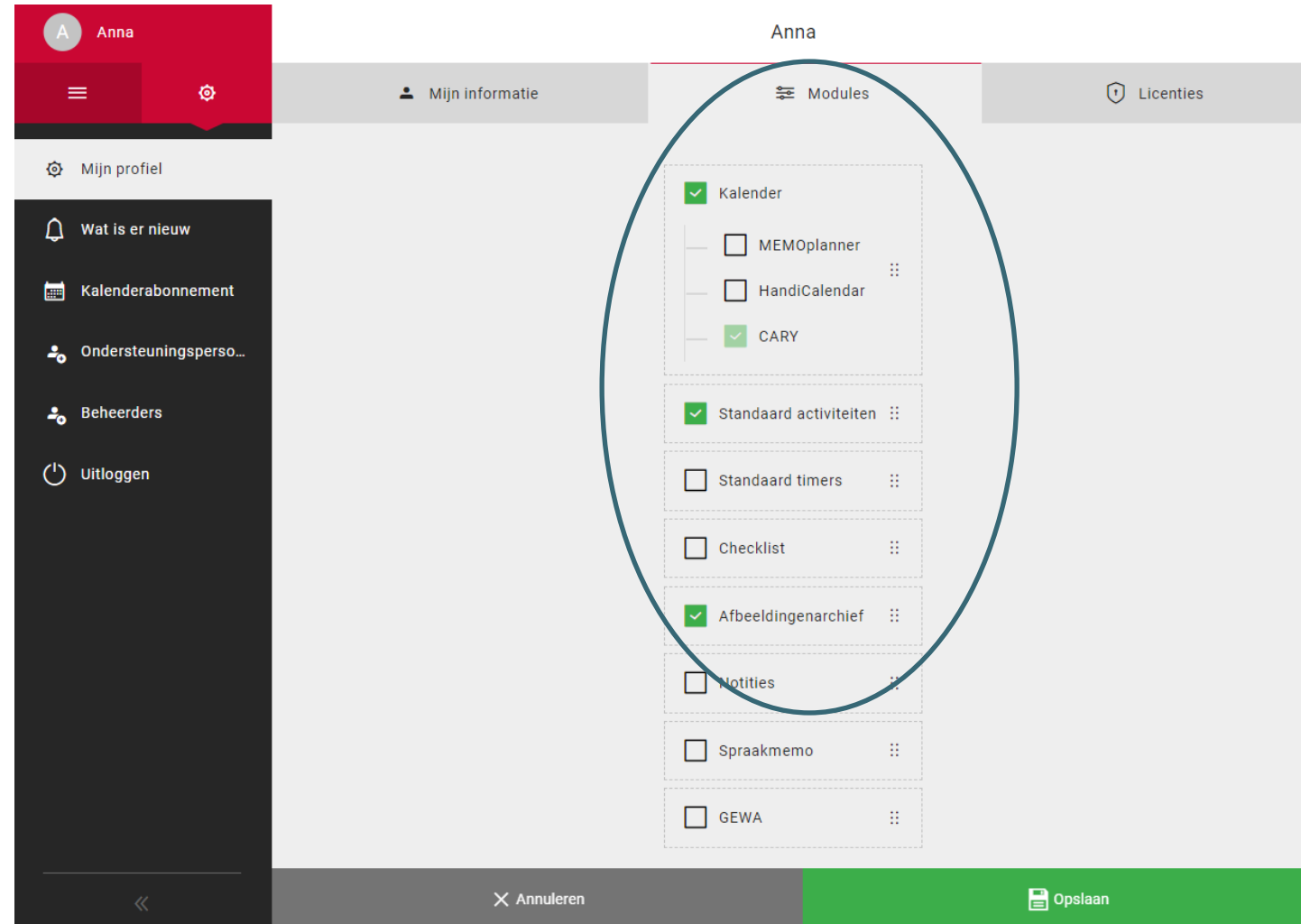

Importeren van het beeldarchief CARY

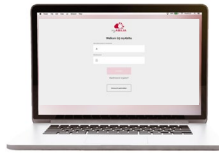

1. Selecteer  en **Afbeeldingenarchief** in het menu.
2. Selecteer **Nieuw** en **Importeren uit afbeeldingsbibliotheek**.
3. Selecteer afbeeldingsbibliotheek **CARY** en **Toevoegen**.

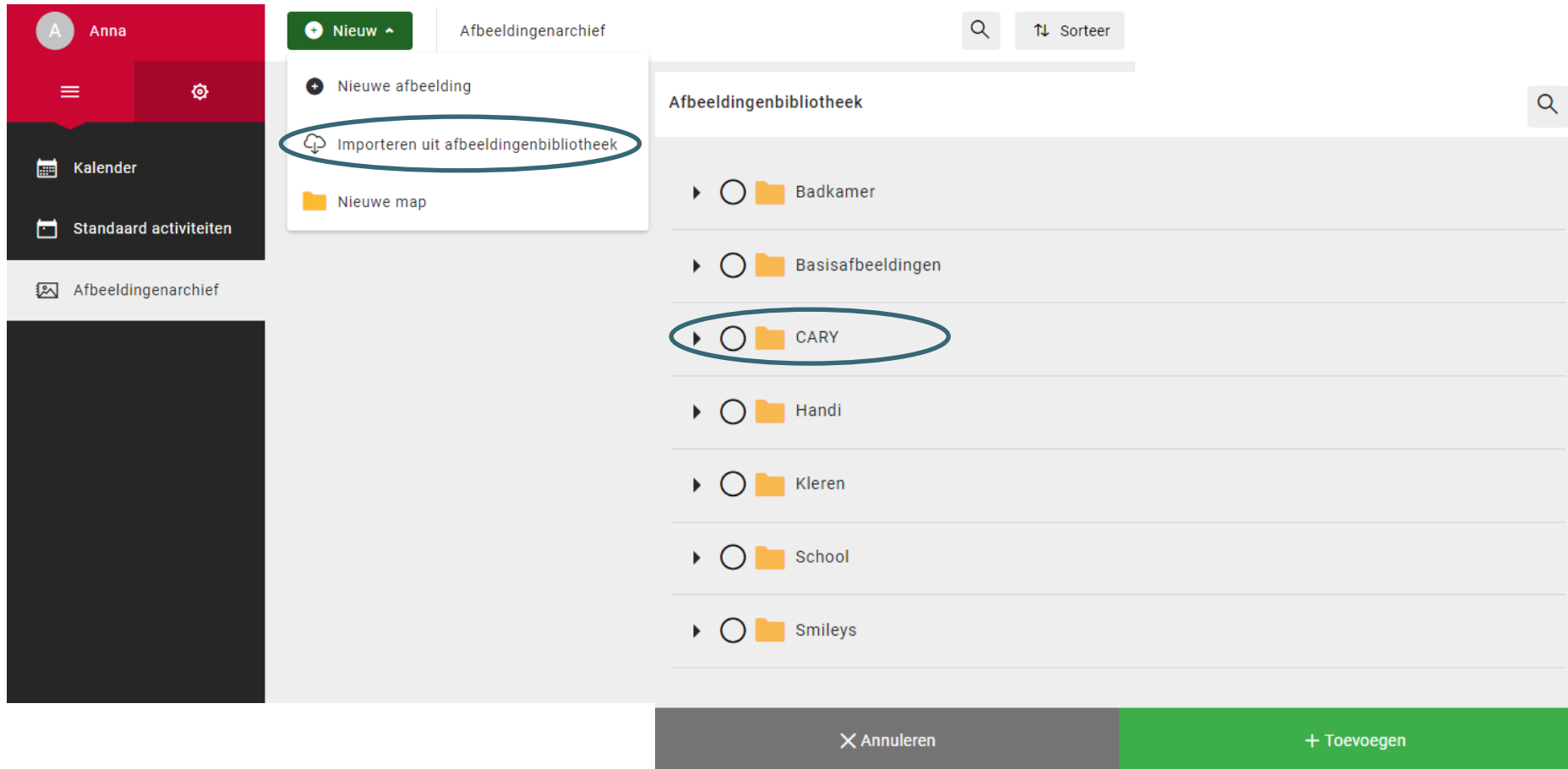

The screenshot displays the ABILIA software interface. On the left, a red sidebar contains a user profile 'Anna' and a menu with icons for 'Kalender', 'Standaard activiteiten', and 'Afbeeldingenarchief'. The 'Afbeeldingenarchief' menu is open, showing options: 'Nieuwe afbeelding', 'Importeren uit afbeeldingsbibliotheek' (circled in blue), and 'Nieuwe map'. The main area shows the 'Afbeeldingsbibliotheek' with a list of folders: 'Badkamer', 'Basisafbeeldingen', 'CARY' (circled in blue), 'Handi', 'Kleren', 'School', and 'Smileys'. At the bottom, there are two buttons: 'Annuleren' (grey) and '+ Toevoegen' (green).


CARY Base verbinden met myAbilia



1. Ga naar het aan/uit-menu en selecteer **Instellingen**.




2. Als het toestel niet met internet is verbonden, selecteert u **Internet** en selecteert u een beschikbaar draadloos netwerk (Wi-Fi).
3. Selecteer **myAbilia**.
4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Inloggen**.
5. Selecteer **Terug** en dan **Sluiten** om terug te keren naar het hoofdscherm.

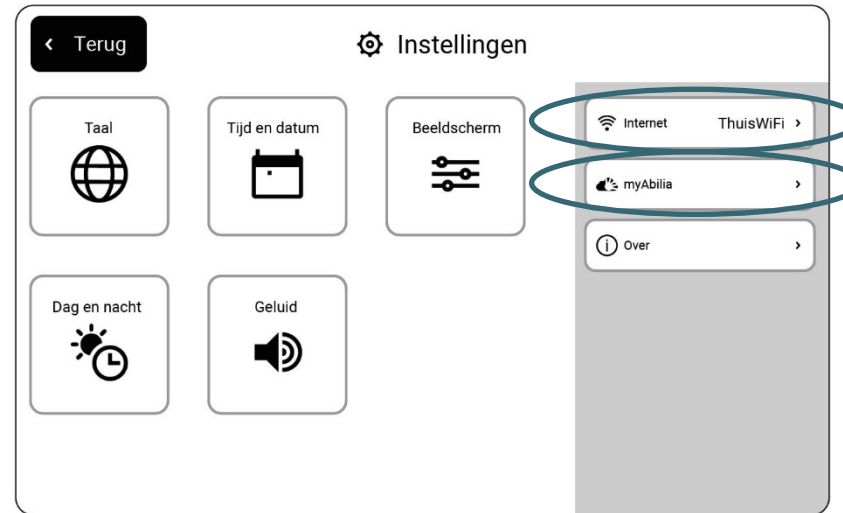

Activiteiten toevoegen

1. Meld u aan op www.myabilia.com met uw gebruikersaccount.
2. Tik direct in de kalender om de **Datum** en **Starttijd** van de activiteit te selecteren.
3. Voer de naam van de activiteit in het veld **Naam** in.
4. Voeg een **Afbeelding** en **Beschrijving** toe aan de activiteit (optioneel).
5. Selecteer om een **bericht** of **tekst** af te spelen wanneer de herinnering wordt weergegeven (optioneel).
6. Selecteer **Creëren** om de activiteit op te slaan.

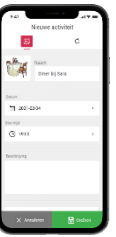

CARY Nieuwe activiteit

Naam & Afbeelding **Terugkerend**

Afbeelding



Naam

Hond uitlaten

Datum

27-08-2021

Beschrijving

Vergeet plastic zakken niet

Starttijd

15:30

☐ Bericht opnemen

Extra instellingen

☒ Weergeven in dagplan ☐ Tekst afspelen bij alarm

Annuleren **Creëren**

Bericht =

Opgenomen geluid of voorlezing van tekst (naam en beschrijving)



Naam


Beschrijving

Afbeelding =

Foto uit de afbeeldingsbibliotheek of uw eigen foto.

Hoe werkt myAbilia?

Een activiteit toevoegen in CARY Base
via myAbilia

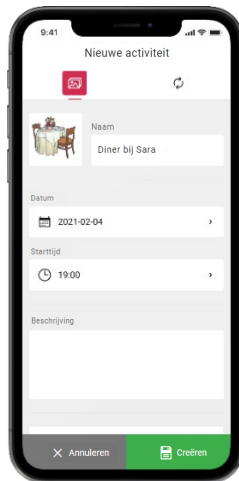

De activiteit wordt weergegeven
in CARY Base



CARY Base wordt bijgewerkt:

- Elke vijf minuten
- Wanneer u op Kalender tikt

OPMERKING! De afbeeldingsbibliotheek in myAbilia is niet zichtbaar in CARY Base.